

HCT-P01 시리즈 전용 겔 패드 취급 설명서

형번: HCT-P01G1-K HCT-P01G2-K

보 제품은 에클리어 린 HCT-P01 시리즈 전용 겤 패드인니다 이 상품은 전기 자극을 신체에 전달하기 위해 부착하는 것입니다. 사용하기 전에 반드시 에클리어 린 P01 시리즈의 취급 설명서를 잘 읽은 후 올바르게 사용하신시오

안전상의 주의 사항(반드시 지켜 주십시오)

사용자 및 다른 사람에게 미칠 수 있는 위해 · 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 하는 사항을 다음과 같이 설명하고 있습니다.

■표시 내용을 무시하고 잘못 사용한 경우에 발생하는 위해 및 손해의 정도를 다음과 같은 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

'사망 또는 중상 등을 입을 경고 가능성이 예상되는 내용입니다.



상해를 입을 가능성 또는 물적 손해만 발생할 가능성이 예상되는' 내용입니다.

◯ 해서는 안되는 '금지' 내용입니다.

반드시 실행해야 하는 '강제' 내용입니다.

⚠ 경고

트레이닝 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 사고 및 문제 발생, 고장의 원인이 됩니다

아래의 부위에는 사용하지 마십시오.

- 흉부 등의 심장 부근이나 머리 및 얼굴 등의 목 위쪽 부위 상처 부위, 눈, 입, 음부 등의 점막 부위 성형 수술한 부위
- · 금속, 플라스틱, 실리콘 등이 이식되어 있는 부위 · 배골, 척추 · 문신(타투)을 한 부위 · 생리 중인 복부
- 목걸이 및 시계, 바디 피어싱을 한 부위

겔 패드의 표면이 뜯어져 있거나 손상되어 있는 상태에서 사용하지 마십시오. 사고 및 문제 발생, 고장의 원인이 됩니다

본체와 겔 패드를 연결ㆍ분리할 때, 겔 패드를 부착ㆍ교체ㆍ떼어낼 때는 반드시 전원을 끈 후에 실시하십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다

분해 및 수리, 개조하지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다

보 제품은 1이용인니다 여러 사람이 동시에 사용하지 마십시오. 감전 · 사고의 원인이 됩니다

겔 패드 교환 방법

① 본체의 전원이 꺼져(LED 램프가 꺼져) 있는 것을 확인합니다.


② 본체를 겔 패드에서 분리합니다.

[코어 패드의 경우]



③ 겔 패드를 봉투에서 꺼냅니다. (겔 패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 마십시오.)

(4) 본체와 겔 패드의 연결 단자를 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 연결합니다.

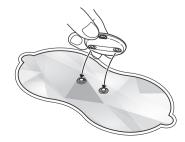

※트윈 패드도 같은 방법으로 교환하십시오.

⚠ 주의

- 아래의 장소에서는 사용하거나 보관하지 마십시오. • 직사광선이 닿는 곳 • 난방 기구 주변 등 습도가 높은 곳 • 먼지가 많은 곳 물기 주변 • 진동이 많은 곳
- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다. 장시간 겔 패드를 피부에 붙인 상태로 두지 마십시오.
- 피부 염증 등의 원인이 됩니다 겔 패드가 물에 젖은 상태에서 사용하지 마십시오.
- 감전 · 사고의 원인이 됩니다.
- 겔 패드를 2장 겹친 상태에서 사용하지 마십시오. 각전 · 사고의 원인이 된니다
- 기기에 하중이 걸리는 자세 및 무리한 자세로 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다
- 1일 1부위당 30분 이상 사용하지 마십시오.
- 사고 및 몸 상태 불량의 원인이 됩니다.
- 동시에 사용하는 경우에는 두 부위까지만 사용하십시오. 사고 및 몸 상태 불량의 원인이 됩니다.
- 본체와 겤 패드는 옥바르게 확실히 연결되어 있는지 확인한 후 사용하십시오 본 제품을 사용하여 강한 자극 및 피부에 습진, 발적, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오.
- 사고 및 몸 상태 불량의 원인이 됩니다 젖은 손으로 전용 USB 케이블 및 겔 패드를 만지지 마십시오.
- 감전 및 고장, 사고의 원인이 됩니다.
- 유아의 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. 사고의 원인이 됩니다. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사와 상담하십시오
- 본 제품을 폐기할 때는 거주하는 행정 기관의 지도에 따르십시오

패키지 내용 확인

제품에 관한 안내는 엘레컴코리아 콜 센터(뒷면 기재)에 문의하십시오.



취급 설명서(본서)

형번: HCT-P01G2-K 트위 패드 (소모품)

코어 패드(1매입)

보관용 시트

취급 설명서(본서)

취급 및 세척 방법

■겔 패드의 취급에 대해

- 겔 패드의 부착면을 만지지 마십시오.
- 겔 패드는 구부리지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 보관용 시트 양면에 붙여 보관하십시오.
- 겔 패드가 젖은 상태에서 사용하지 마십시오. 충분히 수분을 제거하고 부착면을 자연 건조시킨 후 사용하십시오.
- 직사광선이 닿지 않는 곳, 습기가 적은 곳에 보관하십시오.

■겔 패드 세척(세척 기준: 30회 정도 사용할 때마다 1회)

본체에서 겔 패드를 분리한 상태에서 세척하십시오.

아래의 경우에 겔 패드를 세척하십시오.

- 겔 패드의 부착력이 약해졌을 때
- 사용 시의 자극이 약해졌을 때
- 사용 시에 따끔한 자극을 느낄 때
- 겔 패드가 더러워졌을 때 • 겔 패드가 보관용 시트에 붙지 않을 때

세척해도 자극이 약해졌거나 따끔한 느낌을 받는 경우에는 겔 패드를 교환하십시오.

(1) 소량의 물을 뿌리면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 세척합니다.

※물을 많이 뿌리지 마십시오. 접착력 저하 및 접착면 손상의 원인이 됩니다.







(2) 손잡이를 잡고 충분히 물기를 제거한 후 자연 건조시킵니다. ※충분히 건조시키지 않은 경우, 접착력이 약해집니다. ※티슈 및 천 등으로 접착면을 닦지 마십시오. ※직사광선을 피하십시오.



앞

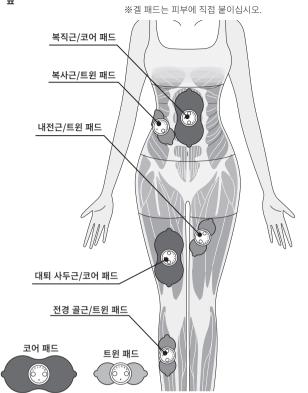

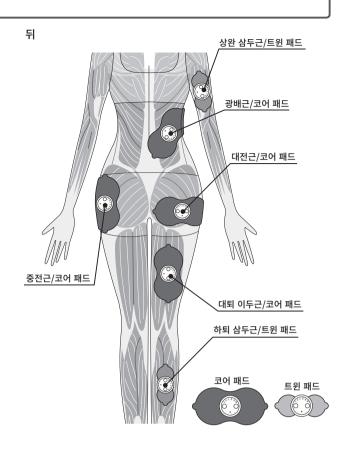

보관 방법

본 제품은 다음의 조건을 만족한 환경에서 보관하십시오.

보관 온도: -10°C ~ 60°C 보관 습도: 20 ~ 85%RH

■세척과 보관 시의 주의 사항

- 세척 시 벤진, 시너 등을 사용하지 마십시오.
- 아래의 장소에는 보관하지 마십시오.
- -직사광선이 닿는 곳
- -고온, 다습, 물기 주변, 먼지가 많은 곳
- -진동이 많은 곳
- -화학 약품 보관 장소 및 부식성 가스가 발생하는 장소
- 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



제광액 卹

벤진

시너

사양

치수	트윈 패드 (W×H×D) 약 125×50×5mm 코어 패드 (W×H×D) 약 175×85×5mm
중량	트윈 패드 약 5g(2 매입) 코어 패드 약 12g(1 매입) ※ 1 매당 질량
사용 환경 온습도	0° C ~ 40° C 20 ~ 85%RH
보관 환경 온습도	-10° C ~ 60° C 20 ~ 85%RH



적합성평가 (Electronic Muscle Stimulator) 인증번호: MSIP-REM-ELJ-HCT-P01

제작자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

ELECOM Korea Co., Ltd.

ECCOUNT NOTES DU., Ltd. 5F Suam Blog. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea TEL: 1588 - 9514 www.elecom.co.kr

Eclear lean Gel pad

Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations

1st edition, October 23, 2017

©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.