


電子カルテラック 取扱い及び組立説明書

HPD-10NB

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

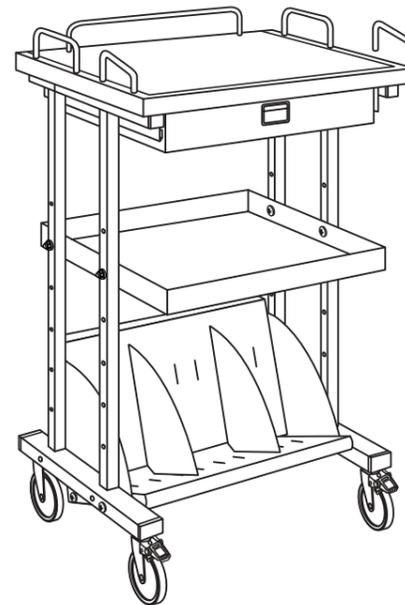

マーク一覧

- 

付属工具を使
っての組み
立てがあり
ます。
- 

プラスドライ
バーを使っ
ての組み
立てがあ
ります。
- 

2人以上で
作業を行
ってください。
- 

左右共通
の部材を
使用しま
す。
- 

右用と左用
とで部材
の形状が
異なります。
組み立て
の際に取
り付け間
違いのな
いようご
注意下さ
い。

組立・使用上の注意









- ⚠ 注意マーク.....この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。
- ⚡ 警告マーク.....この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。







- ⚠ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組み立てを行ってください。
- ⚠ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。
- ⚠ 組み立ての際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組み立ては絶対に避けて下さい。
- ⚠ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行ってください。(その際、天板・棚板等に載せているすべての機器を取り外して行って下さい。)
- ⚠ 組み立て手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。ネジが緩いと危険です。
- ⚠ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けて下さい。必ず堅く絞ったぞうきんなどで、拭くなどして下さい。
- ⚠ 組み立て時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。
- ⚡ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。
- ⚡ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないで下さい。
- ⚠ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。

商品に関する エレコム総合インフォメーションセンター
お問い合わせは TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00 **年中無休**

部品一覧

組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。
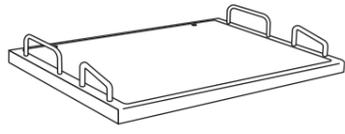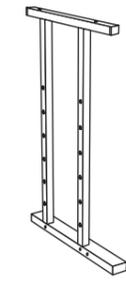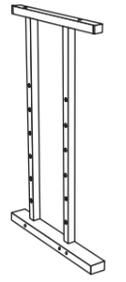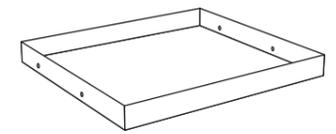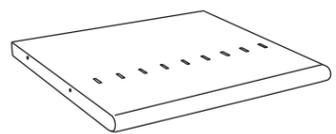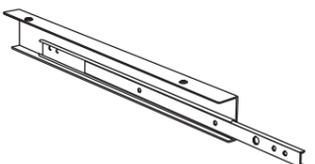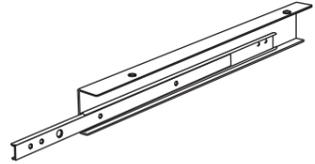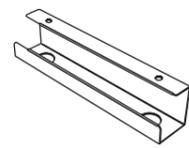
| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 天板 1枚  | 右フレーム 1本  | 左フレーム 1本  | 引き出し 1個  | 薬品棚 1枚  |
| ファイル立てパネル 2枚  | | | ファイル立てサイドパネル 2枚  | 右スライドレール 1本  |
| | | | | 左スライドレール 1本  |
| 転倒防止バー 1本  | タップトレイ 1個  | | | |
| キャスター (ストッパー有) 2個  | キャスター (ストッパー無) 2個  | 仕切板 2枚  | | |
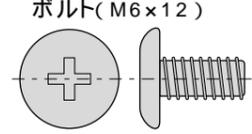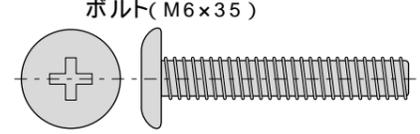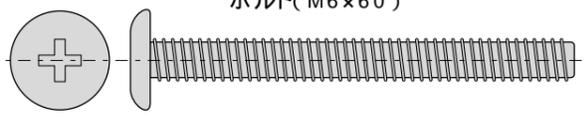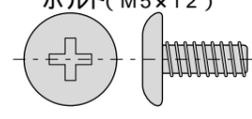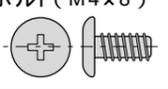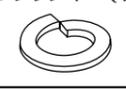
| | | | |
|---|---|---|---|
| A 10本 ボルト(M6×12)  | B 10本 ボルト(M6×35)  | | |
| C 2本 ボルト(M6×60)  | D 2本 ボルト(M5×12)  | | |
| E 4本 ボルト(M4×8)  | F 4個 袋ナット(M6)  | G 24個 Sワッシャー(小)  | H 24個 平ワッシャー  |
| I 4個 Sワッシャー(大)  | 付属 工具 1本 スパナ(大)  | 付属 工具 1本 スパナ(小)  | |



組立説明

本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行って下さい。
床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立てて下さい。

使用する工具 & ご用意いただくもの




1 ファイル立てパネル 2枚と、ファイル立てサイドパネル 2枚を
ボルト A・Sワッシャー(小)G・平ワッシャー Hで図の
4ヶ所のみ固定します。

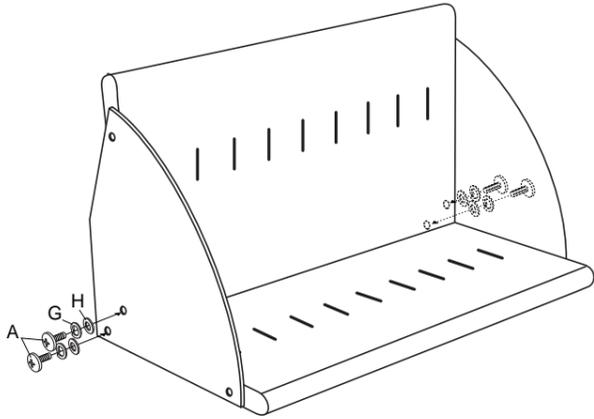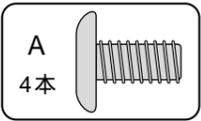



2

右フレーム、左フレームに
キャスター(ストッパー有)・Sワッシャー(大)I、
キャスター(ストッパー無)・Sワッシャー(大)Iを
付属工具のスパナ(大)でそれぞれ取り付けます。
右フレーム、左フレームに行程1で組み立てたファイル立てを
ボルト B・Sワッシャー(小)G・平ワッシャー H、
ボルト C・Sワッシャー(小)G・平ワッシャー Hでゆるく固定します。



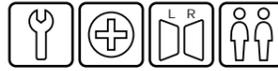


組み立てのコツ

ファイル立てを横に寝かせた状態でファイル立て
パネル、ファイル立てサイドパネルの穴位置
を合わせる。その上から左フレームを載せ、穴
位置を合わせボルト B、ボルト Cで固定します。
裏返して右フレームを固定するとカンタンです。

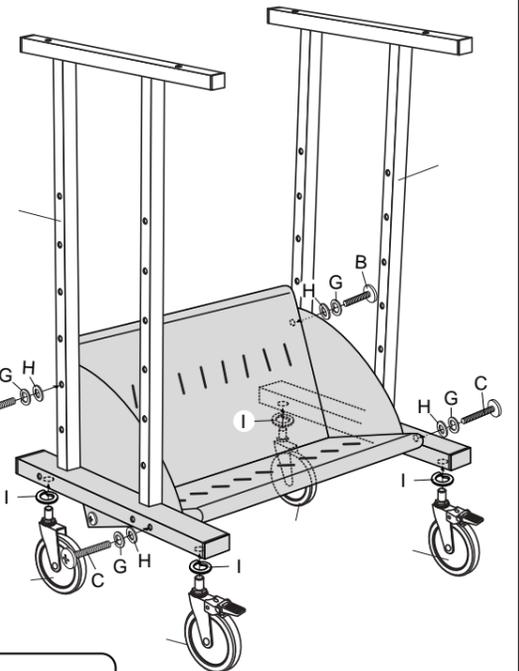
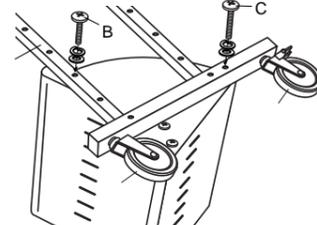


3 天板に転倒防止バーをボルト D・Sワッシャー(小)G・
平ワッシャー Hで固定します。
右フレーム、左フレームに天板をボルト B・Sワッシャー(小)G・
平ワッシャー Hでゆるく固定します。

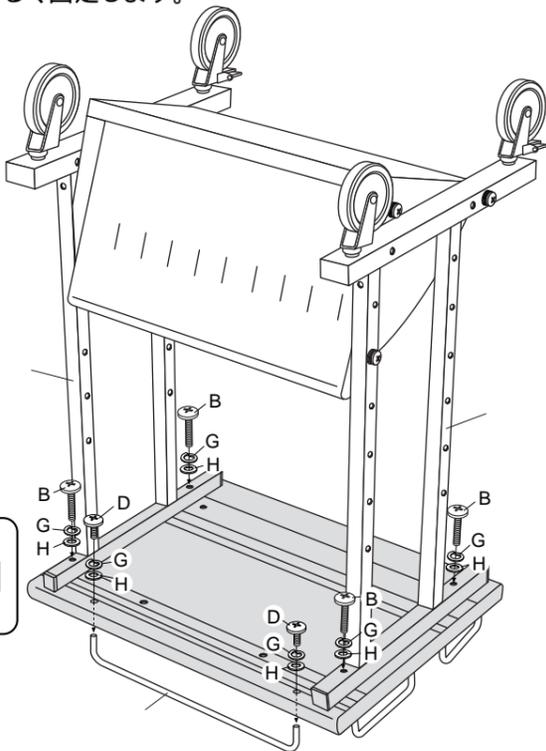
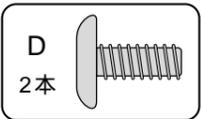
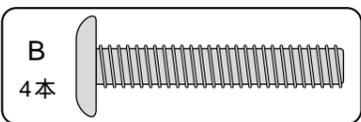


4

天板にタフトレーをボルト A・Sワッシャー(小)G・
平ワッシャー Hで固定します。
天板に右スライドレール、左スライドレールを
ボルト A・Sワッシャー(小)G・平ワッシャー Hでゆるく固定します。

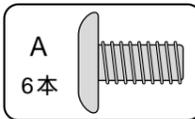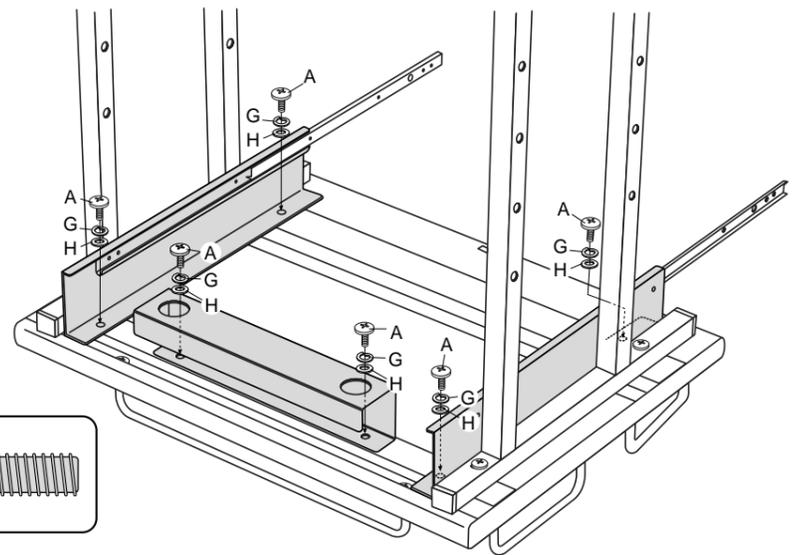

5 引き出しをボルト Eでゆるく固定します。
薬品棚をボルト B・袋ナット F・Sワッシャー G、
平ワッシャー Hで付属工具のスパナ(小)を用い
ゆるく固定します。

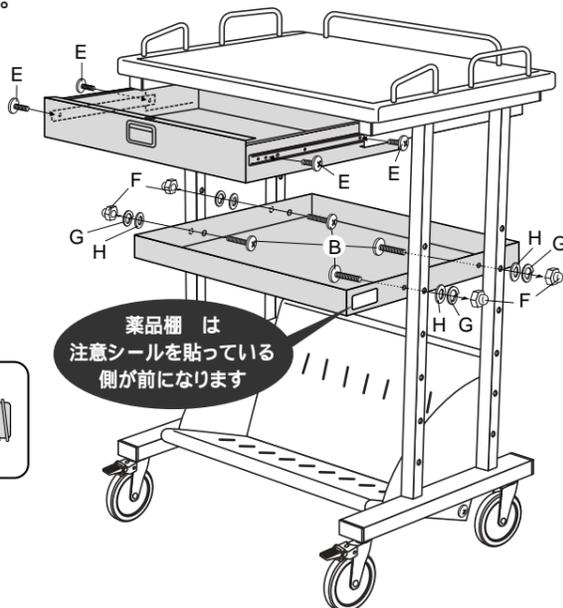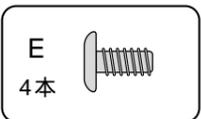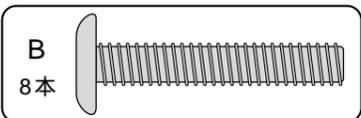

薬品棚は
注意シールを貼っている
側が前になります

6

全てのボルトを完全に固定します。
仕切板をファイル立ての
お好みの位置に差し込み
組立完了です。

