


やさしい補聴器 EHA-PA01 シリーズ

簡単マニュアル

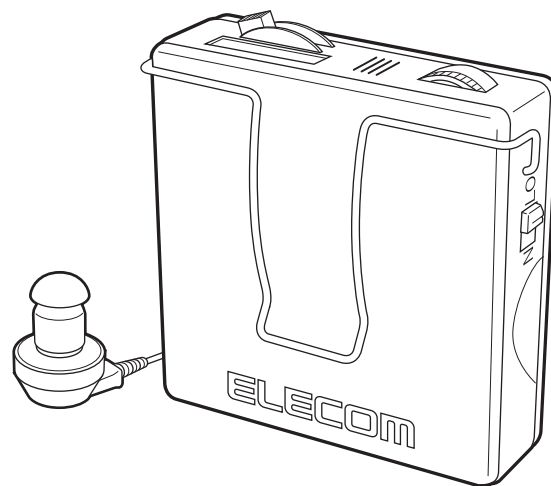


本書はご使用までの流れを簡単に説明した内容です。
詳しい内容は「取扱説明書」ご参照ください。


1 ご使用前の準備

- 電池を入れる
- 耳せんを取り付ける

1 電池カバーを開けます。

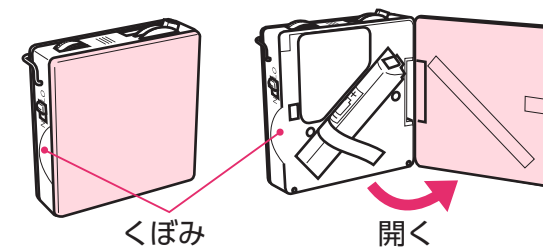


2 単四形乾電池(別売)を1本入れ、電池カバーを元に戻します。

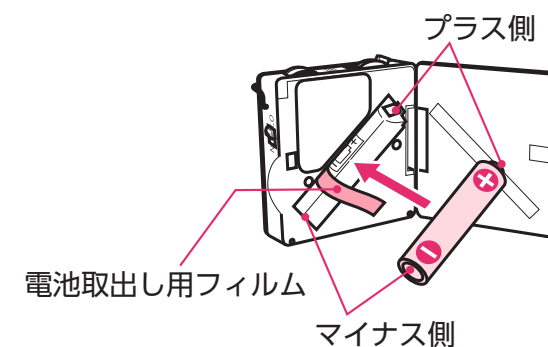

3 耳せんをイヤホンに取り付けます。


- 耳せんをつけるときは、矢印の方向に差し込んでください。

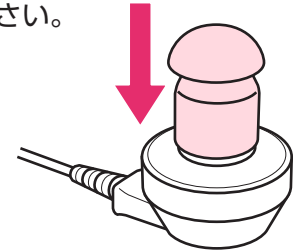


2 ご使用方法

- 電源スイッチを入れる
- 音量を調整する


1 音量を1にします。

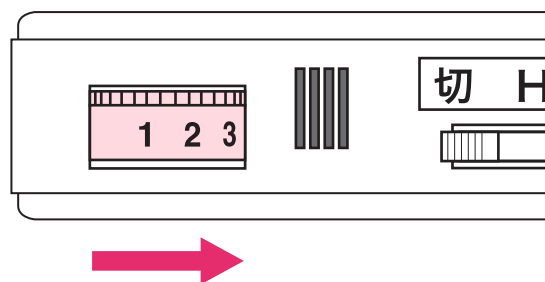


2 電源スイッチを〈N〉にします。

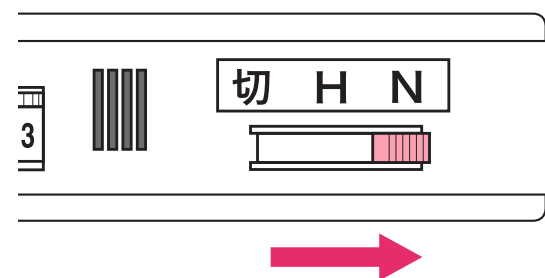

3 イヤホンを耳に入れます。

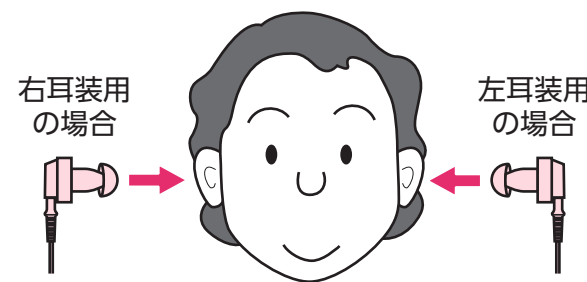

4 音量を調整します。

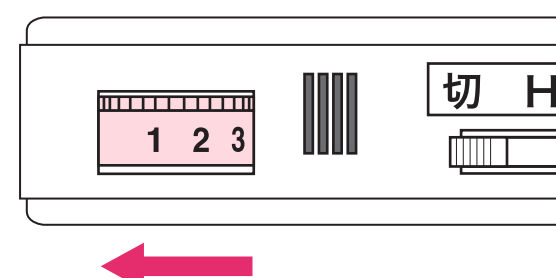

3 こんな時は? 使い終わったら

■ ピーピー音がする


耳せんを耳の奥までしっかりと差し込んでください。
耳せんのサイズを交換してみてください。

■ 周囲の騒音が大きくて会話が聞き取りにくい

電源スイッチを〈H〉にしてください。
騒音抑制回路が働きます。

■ 扉をしめる音などの衝撃音が気になる

出力制限スイッチを〈LO〉にしてください。

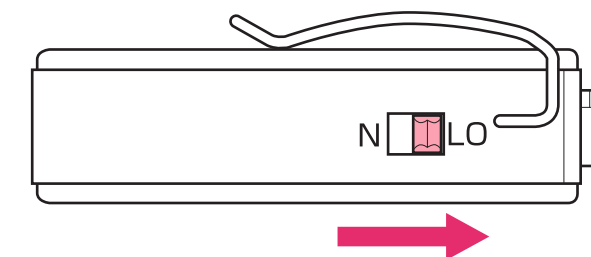

■ 使い終わったら

電源スイッチを〈切〉にします。

