

ハンズフリーループ(1.6 倍) 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では本製品のご使用方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前にかならずお読みください。

安全にご使用いただくために

	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示はかならず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意

	太陽を直視しないでください。 目に障害が残る可能性があります。
	本製品をかけたまま歩いたり、車の運転をしないでください。
	レンズを下に向けて置かないでください、また本体に無理な力をかけないでください。
	本製品を高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。 壊れる可能性があります。
	かけ外しの時は、かならずテンプル(つる)の付け根を持ち、静かに外してください。
	下記の場所に保管しないでください。 ・お子様やペットの近く ・極端に暑い場所や寒い場所 ・暖房器具や火などの熱源の近く ・浴室など水がかかりやすい場所や多湿の場所 ・ホコリが多い場所 ・直射日光の当たる場所 ・滑りやすい場所 ※使用後は付属の収納ケースに入れて保管してください。


セット内容

- ・本体
- ・取扱説明書(本書)
- ・収納ケース
- ・ストラップ(スライド付)
- ・クリーニングクロス

仕様

- ブルーライトカット率：48%
※自社基準に基づく数値
- 紫外線透過率：1.0%以下
- 倍率：1.6 倍
- 材質
レンズ：ポリカーボネート樹脂(PC)
テンプル(つる)：グリルアミド樹脂(TR-90)
鼻パッド：ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
- 重量：約 34g
- サイズ：約 幅 145mm×高さ 50mm
- テンプル(つる)の長さ：約 165mm

各部の名称

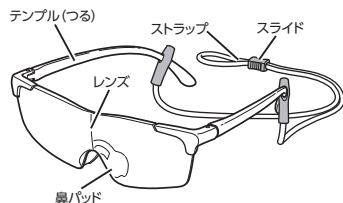

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012

[受付時間]
10:00 ~ 19:00 **年中無休**

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索

えれさぽ

サポートポータル ELECOM SUPPORT

各種機器との
設定方法を
紹介しています！

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせサポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポート、及び日本以外からの商品交換は対応致しかねます。日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。

ハンズフリーループ(1.6倍)


取扱説明書

2018 年10月 第1版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要ですよ。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。


ストラップの取付方法

1

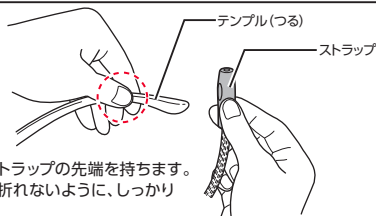

本製品のテンプル(つる)とストラップの先端を持ちます。
この時テンプル(つる)部分が折れないように、しっかり
曲がり部分を持つてください。

2

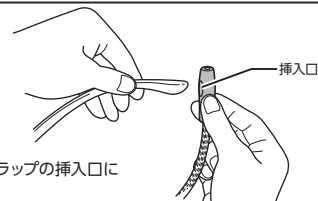


テンプル(つる)の先端をストラップの挿入口に
差し込みます。

3

イラストの位置を目安に、ストラップの挿入口に
テンプル(つる)の先を差し込んでください。

※差し込みが浅いと抜ける場合があります。


また、差し込みが深いと抜けにくくなる場合があります。

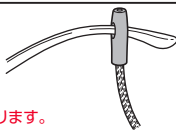

注意

※ストラップを使用時に首を絞めないよう
に気をつけてください。

ストラップのご使用方法

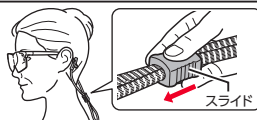

本製品をかけた後、ストラップについているスライド
を締めて頭に固定することができます。
外す時は緩めて首にかけておくことができます。

本体のご使用方法

メガネをご使用の方

1 メガネの上から重ねがけしてください。



裸眼の方・コンタクトレンズの方

1 そのままかけてください。



2 鼻パッドを鼻の先に
かけてご使用ください。



手元の対象を
約 30cm ~ 40cm 離してご覧ください。

※ピントの合いやすい距離や見え方には個人
差があります。

◎正しい例

鼻パッドを鼻の先に
かけます。



× 間違った例

本製品を深くかけないで
鼻パッドを鼻の先にかけ
てご使用ください。



注意

※正しく検眼されたメガネの上から重ねて
かけてください。
※市販の簡易型の老眼鏡の上からかけても
よく見えませんので購入店に相談して
ください。

お手入れ方法

■レンズが汚れた時は
付属のクリーニングクロスで拭き取ってくだ
さい。
※レンズ清掃の際、アルコール等の有機溶剤
は絶対に用いないでください。