


ECLEAR refree

에 클 리 어 리 프 리

저주파 치료기 P01

사용설명서

HCM-P01 시리즈

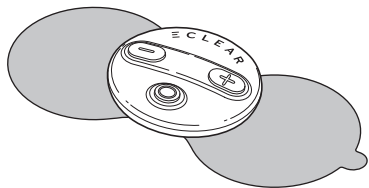

본 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

이 설명서는 조작방법과 안전한 사용을 위한 주의사항이 기재되어 있습니다.

사용하시기 전에 반드시 이 사용설명서를 읽으시기 바랍니다. 또한, 이 설명서를 다

읽으신 후에는 소중히 보관하시기 바랍니다.

안전상 주의 사항(반드시 지켜 주십시오.)

사용하시는 분이나 다른 사람에 대한 위험, 재산 손해를 미리 방지하기 위하여 반드시 지켜야 할 사항을 다음과 같이 설명합니다.

■ 표시 내용을 무시하고 잘못된 사용을 했을 때 발생하는 위험이나 손해의 정도를 다음 표시로 구분해 설명하고 있습니다.

 위험	이 표시가 되어 있는 항목은 “사망 또는 중상을 입을 가능성이 크다”는 내용입니다.
 경고	이 표시가 되어 있는 항목은 “사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상된다”는 내용입니다.
 주의	이 표시가 되어 있는 항목은 “상해를 입을 가능성 또는 물적 손상만이 발생할 가능성이 예상된다”는 내용입니다.
	이 그림 표시는 해서는 안 되는 “금지” 내용입니다.
	그림 표시는 반드시 실행해야 할 “강제” 내용입니다.

위험



아래와 같은 의료기기와 병용 사용은 절대로 하지 마십시오.

- 심박 조율기 등 체내 이식형 전자기기
- 인공심폐기 등 생명유지용 의료용 전자기기
- 심전계 등 장착형 의료용 전자기기

이들 의료용 기기의 오작동을 일으켜 생명에 중대한 장애를 초래할 원인이 됩니다.

경고



심장 부근, 두부, 얼굴, 입안이나 음부, 피부질환 부위 등에 사용하지 마십시오.

사고나 부상, 몸 상태 불량 등의 원인이 됩니다.



치료 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

사고나 트러블, 고장의 원인이 됩니다.



다른 치료기기와 동시에 사용하지 마십시오.

속이 빠지는 등 몸 상태가 나빠지는 원인이 됩니다.

⚠ 경고

⊘	어린이가 사용하지 않도록 하고 기기 본체 및 젤패드 위에서 놀거나 위에 올라가지 않도록 하십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
⊘	젤패드에 시계나 목걸이 등의 금속이 닿은 상태에서 사용하지 마십시오. 사고나 상처의 원인이 됩니다.
⊘	젤패드 뒤쪽이 떨어져 있거나 망가져 있는 상태에서 사용하지 마십시오. 사고나 트러블, 고장의 원인이 됩니다.
!	본체와 젤패드를 접촉하거나 떼어낼 때 젤패드를 붙이거나 다시 붙이거나 떼어낼 때는 반드시 전원을 끄고 나서 하십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
!	아래에 해당하는 분은 의사와 상담하신 후에 사용하십시오. · 의사로부터 치료를 받고 있는 분, 또는 몸에 특별히 이상을 느끼는 분 · 약성 중량이 있는 분 · 심장, 뇌신경에 이상이 있는 분 · 임신한 분, 출산 직후인 분 · 체온이 38°C 이상(유열기)인 분(※ 사례 1: 급성 발증 증상(권태감, 오한, 혈압 변동 등)이 강한 시기 ※ 사례2: 쇠약해져 있을 때) · 감염증 질환인 분 · 피부 지각장애 또는 피부에 이상이 있는 분 · 척추 골절, 염좌, 근육파열 등 급성(동통성) 질환인 분 · 안정을 해야 하는 분 · 약을 복용하고 있는 분 · 혈압에 이상이 있는 분 · 사지가 부자유스러운 분 · 자기 스스로 의사표시를 할 수 없는 분 · 당뇨병 등으로 고도의 말초순환장애로 지각장애가 있는 분 · 저온 상태인 분 · 혈액 순환에 장애가 있는 분 · 잠시 사용했지만, 효과가 나타나지 않는 분 · 젤패드가 피부에 맞지 않는 분 사고나 몸 상태가 나빠지는 원인이 됩니다.

⚠ 경고

⊘ 분해 금지	분해나 수리, 개조를 하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
⊘	본 제품은 1인용입니다. 복수의 사람이 사용하지 마십시오. 감전, 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

⊘	아래 장소에서는 사용하지거나 보관하지 마십시오. · 직사광선이 쬐는 장소 · 난방기구 가까이 등 온도가 높은 장소 · 욕실 등 습기가 많은 장소 · 수분 근처 · 먼지가 많은 장소 · 진동이 많은 장소 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다
⊘	취침 때에는 사용하지 마십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
⊘	자동차, 오토바이, 자전거 등 운전 직전이나 운전 시에는 사용하지 마십시오. 사고나 트러블의 원인이 됩니다.
⊘	장시간 젤패드를 피부에 붙인 채 방치하지 마십시오. 피부 염증 등의 원인이 됩니다.
⊘	젤패드가 물에 젖은 상태로 사용하지 마십시오. 감전 원인이 됩니다.
⊘	한 군데에 15분 이상 사용하지 마십시오. 사고나 몸 상태 불량 등의 원인이 됩니다.
⊘	젤패드를 2장 겹쳐서 사용하지 마십시오. 감전, 사고의 원인이 됩니다.
!	본체와 젤패드는 바르고 확실하게 접촉되어 있는지 확인한 다음에 사용하십시오.

⚠주의

❗	각 조작 버튼이 정상적으로 작동하는지 확인한 다음에 사용하십시오.
❗	처음 사용하실 때나 장시간 사용하지 않았던 기기를 사용하실 때는 사용설명서 대로 조작을 하고 정상적으로 작동하는지 확인한 다음에 사용하십시오.
❗	본 제품 사용으로 강한 자극이나 피부에 습진, 발진, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 의사에게 상담하십시오. 사고나 몸 상태 불량에 원인이 됩니다.
⊘	USB 커넥터 삽입구에 손이나 손가락 등 몸의 일부가 접촉하지 않도록 하십시오. 감전, 장애, 고장의 원인이 됩니다.
⊘	USB 커넥터 삽입구에 금속류를 끼워 넣지 마십시오. 감전이나 발화의 원인이 됩니다.
⊘	케이블을 무리하게 잡아당기거나 구부리거나 무거운 것을 위에 올려놓지 마십시오. 케이블이 손상하거나 끊어지는 등 화재나 감전의 원인이 됩니다.
⊘	전용USB 케이블이 손상하거나 USB 커넥터 삽입구가 헐릴 때는 사용하지 마십시오. 발화나 감전의 원인이 됩니다.
⊘	여행용 컨버터 등 변압기를 사용하여 충전하지 마십시오. 발열이나 발화의 원인이 됩니다.
⊘	담배 소켓 등을 사용하여 차 안에서 충전하지 마십시오. 발화나 발열, 감전의 원인이 됩니다.
⊘ 젖은 손 금지	젖은 손으로 전용 USB 케이블이나 젤패드를 만지지 마십시오. 감전이나 고장, 사고의 원인이 됩니다.
❗	부속 전용 USB 케이블은 본체 충전 이외에는 사용하지 마십시오. 전용 USB 케이블은 통신 용도나 기타 기기의 충전에는 사용할 수 없습니다.
❗	충전 시 전용 USB 케이블은 끝까지 확실하게 꽂으십시오. 불완전하게 꽂은 상태로 충전하면 발화나 감전의 원인이 됩니다.

⚠주의

❗	3개월에 한 번은 반드시 충전하십시오. 완전히 방전하면 충전하지 못하게 될 수 있습니다.
❗	기기에 고장이 발생했을 때는 사용을 즉시 중지하고 전원을 끄십시오.
⊘	유아의 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. 사고 원인이 됩니다. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사에게 상담하십시오.
⊘	본체에 물이나 액체를 넣거나 본체가 젖지 않도록 하십시오. 발열, 파열, 발화의 원인이 됩니다.
❗	본 제품을 폐기할 때는 거주하시는 시구청촌의 지시에 따르십시오.

본 제품에 대하여

■사용 목적 또는 효과

본 제품은 마비된 근육 위축을 예방하며 마사지 효과를 목적으로 한 저주파 치료기입니다.

일반 가정에서 사용하십시오.

■저주파 치료기란?

인체에 부착한 전극을 통해 피부 표면으로부터 미약한 저주파 전류를 흘려보내면 근육이 수축하며 힘줄의 펌프 작용과 혈관 확장으로 혈액을 개선함으로써 결림을 치료할 수 있습니다. 또한, 저주파 전류는 신경에도 작용하여 통증이 뇌로 쉽게 전달되지 않도록 함으로써 통증을 완화할 수 있습니다.

■치료 시간 기준

한 군데에 약 15분이 치료 시간 기준입니다. 15분 이상 계속하면 몸 상황이 불편해지는 원인이 될 수 있습니다.

본 제품은 치료 개시 후 약 15분 경과하면 자동적으로 전원이 꺼지는 타이머가 내장되어 있습니다.

■효과적인 치료 시기

목욕 후에 치료하면 효과적입니다. 몸이 따뜻해져 있으므로 혈액개선 효과도 높아집니다.



주의:

피부의 땀이나 수분을 깨끗이 닦은 후에 사용하십시오.


패키지 내용 확인

사용하기 전에 부속품이 전부 들어 있는지 확인하십시오.


본체




젤패드(2 Point Pad)
(소모부품)

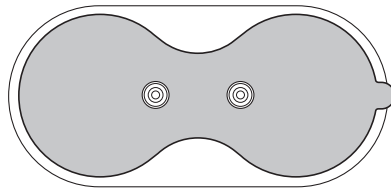


전용 USB 케이블

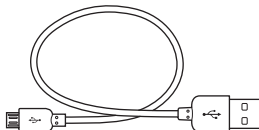

보관용 시트

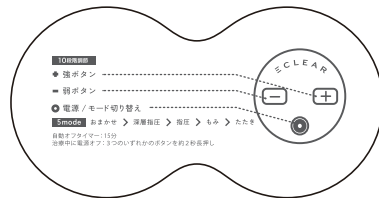

수납 파우치

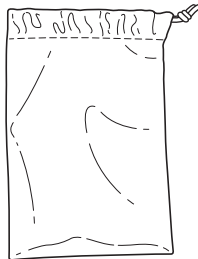

사용설명서 본서


■별매품

다음 별매품을 판매하고 있습니다.

판매명: 젤패드 P01


의료기기 신고번호 : 27B2X00293000001

1 Point Pad(2장 입)

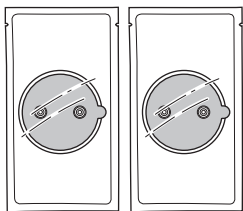


제품형 번호: HCM-P01G1

2 Point Pad(2장 입)

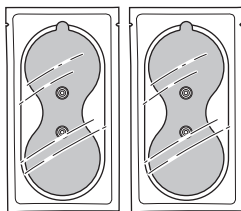

제품형 번호: HCM-P01G2


Wide Pad(1장 입)

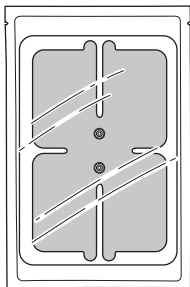


제품형 번호: HCM-P01G3

각 부분의 명칭

■본체

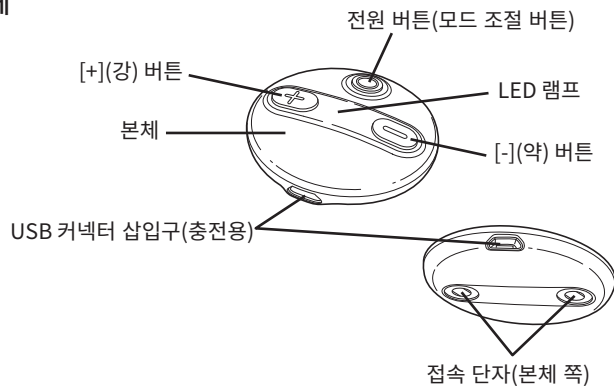

■젤패드

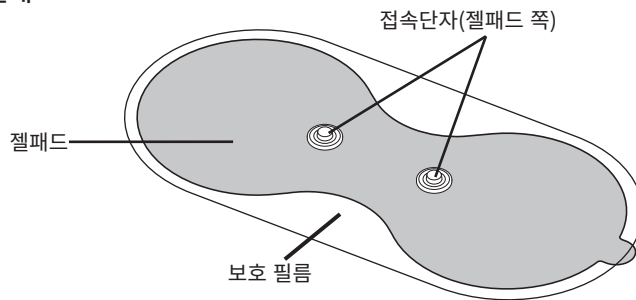

■전용 USB 케이블



준비

사용 시작(구매 직후나 장시간 사용하지 않았을 때)이나 사용 중에 전지 잔량이 없어졌을 때는 반드시 완전히 충전 될 때까지 충전하십시오.


1 충전한다

충전 시간: 약 3.5시간

- ① 전용 USB 케이블의 USB micro B 커넥터를 본체의 USB 커넥터 삽입구에 접속합니다.
※접속이 바르게 되면 “삐”하는 소리가 나며 본체의 LED 램프가 점멸 또는 점등됩니다.

LED 램프

충전 잔량이 80% 미만일 때는 빨간색으로 점멸, 80% 이상일 때는 녹색으로 점멸, 완전 충전일 때는 녹색으로 점등됩니다.

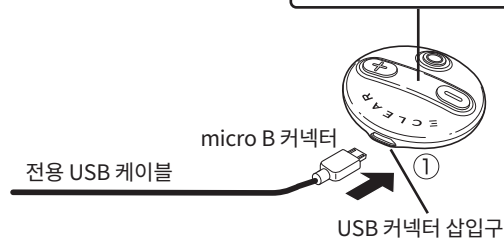

⚠ 주의:


- 여행용 컨버터 등 변압기를 사용하여 충전하면 발열이나 발화할 우려가 있습니다.
- 충전 중에는 조작할 수 없습니다.
- 본체를 반복하여 충전하면 완전 충전 시에 사용할 수 있는 시간이 조금씩 줄어듭니다. 극도로 줄면 전지 수명이 다 된 것이며, 전지는 교환할 수 없습니다.

- ③ 충전이 완료되면 “삐-” 소리가 울립니다.


2

젤패드를 본체에 부착한다


- ① 처음 사용하실 때는 젤패드를 봉지에서 꺼내십시오.
(젤패드에 부착된 보호 필름은 아직 떼어내지 마십시오.)

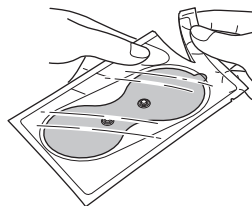

- ② 본체 전원을 끄고 LED 램프가 꺼져 있는 것을 확인합니다.

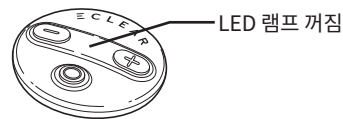

- ③ 본체와 젤패드의 접속 단자를 “찰칵”하는 소리가 날 때까지 접속합니다.

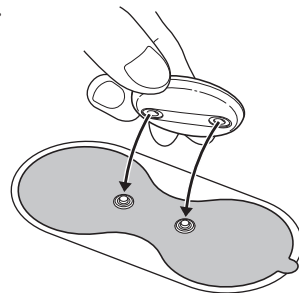


⚠ 주의:


젤패드는 당사가 지정하는 젤패드를 반드시 사용하십시오.

■ 젤패드를 교환할 때는


- ① 본체를 젤패드로부터 떼어 냅니다.

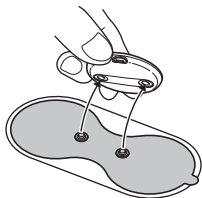

- ② 젤패드를 봉지에서 꺼냅니다.
(젤패드의 보호필름은 아직 벗기지 마십시오.)

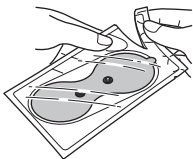

- ③ 본체 전원이 꺼져 있는 것(LED 램프가 꺼져 있는 것)을 확인합니다.
- ④ 본체와 젤패드 접속 단자를 “찰칵”하는 소리가 날 때까지 접속합니다.

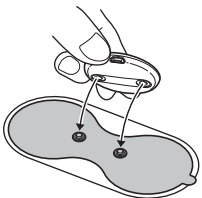


주의:

젤패드를 교환할 때는 젤패드 사용설명서도 함께 읽으십시오.

젤패드 장착

1

젤패드 손잡이를 잡고 보호필름을 떼다.

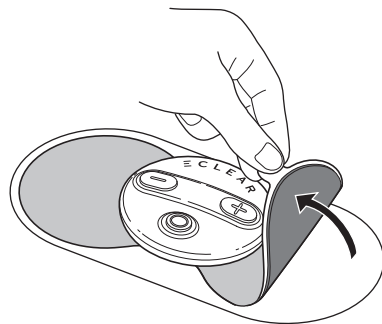

※두 번째 이후에는 보관용 시트에서 떼어서 사용하십시오.

2

젤패드를 치료하고 싶은 부분에 붙인다

젤패드는 피부에 밀착시켜서 붙이십시오.

※젤패드가 피부로부터 떨어지면 본체 전원이 자동적으로 꺼집니다.



주의:

젤패드를 목걸이 등 금속 위에 붙이지 마십시오.


■ 젤패드 취급에 관하여

- 젤패드를 붙이는 면은 만지지 마십시오. 잘 붙지 않게 되었을 때는 “젤패드 손질” (➡P.19)을 보십시오.
- 젤패드는 구부리지 마십시오.

젤패드 붙이는 방법


어깨-승모근-

결리는 부위에 붙인다

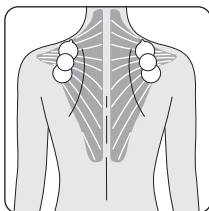


위팔-상박근 군-

위팔이 결리는 부위에 붙인다

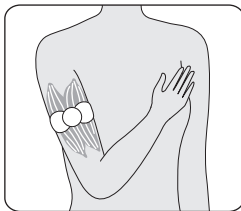


팔-전완 굴근 군-

팔이 결리는 부위에 붙인다

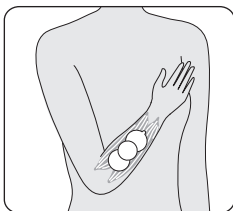

등, 허리-척추기립근-

등골의 근육 외측의 결리는 부위에 붙인다

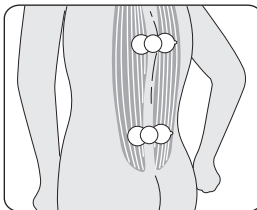


허리-대요근-

앞 다리 허벅지의 제일 위쪽 부위에 붙인다




엉덩이-대둔근-

엉덩이의 제일 뒷부위에 붙인다

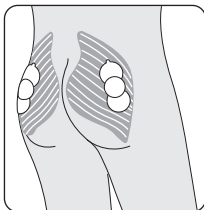


허벅지-햄스트링근-

결리거나 통증이 있는 부위에 붙인다

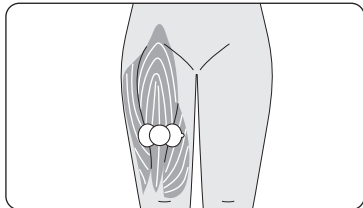

종아리-하퇴삼두근-

결리는 부위에 붙인다

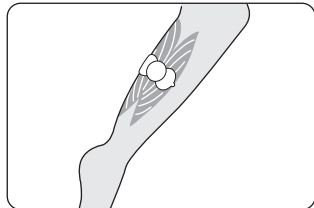


치료

1 전원을 켜다

전원 버튼을 약 2초간 길게 누르면 “빠.” 하는 소리가 나고 전원이 들어오면서 치료가 시작됩니다.

LED 램프가 녹색으로 점등됩니다.

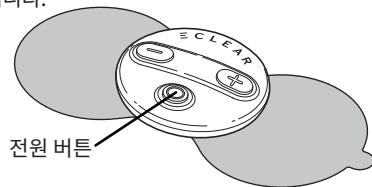


2 모드를 바꾼다

치료 중에 전원 버튼을 누르면 모드를 바꿀 수 있습니다.

※전원을 켰을 때는 항상 “자동” 모드로 시작됩니다.

- 전원 버튼을 누를 때마다 “빠”하는 소리가 나고 아래와 같이 바뀝니다.
“자동” 모드로 돌아오면 “빠”하는 소리가 납니다.

신경통 등 통증을 느끼는 부위에는 “심층 지압”을 권장합니다.

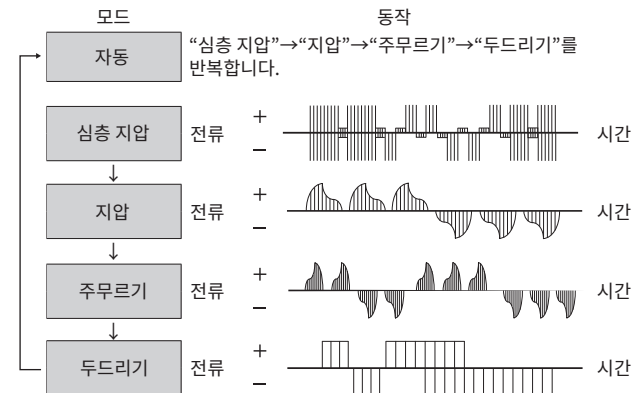


3

세기를 조절한다

10단계 레벨에서 원하는 세기를 선택합니다.

※처음에 전원을 넣었을 때 또는 모드를 변경했을 때의 세기는 레벨 “1”입니다.

- [+] (강) 버튼을 누르면 “삐”하는 소리가 나고 세기가 1단계 올라갑니다.
- [-] (약) 버튼을 누르면 “삐삐”하는 소리가 나고 세기가 1단계 내려갑니다.
- 레벨 “10”에서 [+] (강) 버튼, 레벨 “1”에서 [-] (약) 버튼을 누르면 “삐삐삐”하는 소리가 나고 레벨은 변경되지 않습니다.

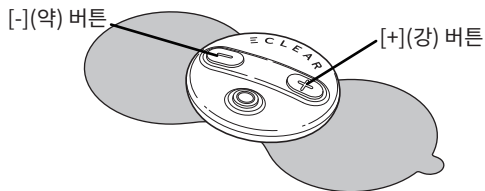


4

전원을 끈다

치료 개시 후 약 15분을 경과하면 “삐-”하는 소리가 나고 자동적으로 전원이 꺼집니다.

※치료 중에 전원을 끄려면 전원 버튼, [+] (강) 버튼, [-] (약) 버튼 중 하나를 약 2초간 길게 누릅니다.

※젤패드가 피부로부터 떨어지거나 젤패드로부터 본체를 떼는 경우에도 전원이 꺼집니다.

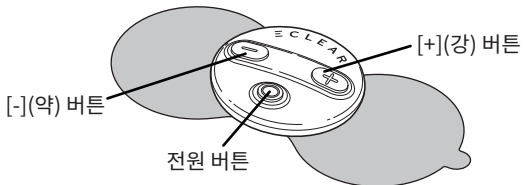


5

수납한다

- ① 젤패드를 피부로부터 떼어 냅니다.


젤패드 접착면에 닿지 않도록 손잡이를 잡고 떼어냅니다.

※Wide Pad의 경우에는 손잡이 2개를 다 잡고 떼십시오.

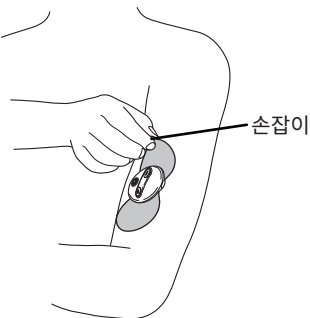


- ② 본체와 젤패드를 떼어 내지 않고 보관용 시트에 붙입니다.

※2개 들어 있는 경우에는 보관용 시트 양면에 붙이십시오.

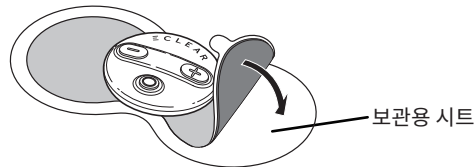

- ③ 부속 수납 파우치에 넣어서 보관합니다.

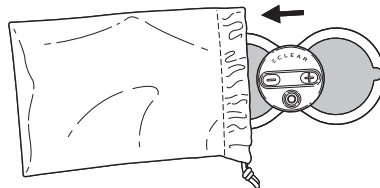

⚠ 주의:

온도나 습도가 높은 곳, 직사광선이 쬐는 곳에 두지 않도록 하십시오.

손질 방법에 관하여


본체에서 젤패드를 떼어낸 상태로 손질하십시오.

■ 젤패드 손질 방법 (손질시기: 30회 정도 사용시 1회 손질)

아래와 같은 경우 젤패드를 손질하십시오.


- 젤패드가 잘 붙지 않게 되었을 때
- 치료 시 자극이 약해졌을 때
- 치료 시에 찌르르한 자극을 느꼈을 때
- 젤패드가 더러워졌을 때
- 젤패드가 보관용 시트에 붙지 않을 때

손질을 해도 자극이 약해지거나 찌르르한 느낌이 있을 때는 젤패드를 교환하십시오.

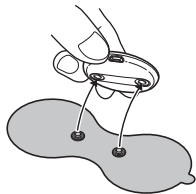


① 소량의 물을 뿌리면서 손가락 끝으로 몇 초간 동안 씻습니다.

※물을 너무 뿌리지 않도록 하십시오. 점착력 저하나 점착 면이 손상을 입는 원인이 됩니다.

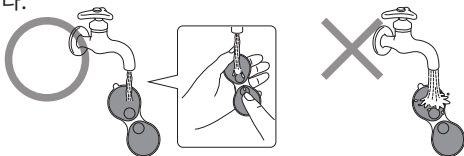

② 손잡이를 잡고 충분히 물기를 없앤 다음 자연 건조시킵니다.

※건조가 충분하지 못하면 점착력이 약해집니다.
 ※티슈나 천 등으로 점착 면을 닦지 마십시오.
 ※직사광선을 피하십시오.

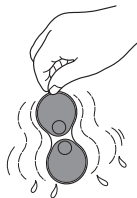

■ 본체 손질 방법

• 본체에 묻은 때는 마른 천으로 닦아냅니다.



주의:

본체 내부, USB 커넥터 삽입구에 물 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.

보관 방법

본 제품은 다음 조건을 충족하는 환경에서 보관하십시오.

보관 온도: -10℃~60℃

보관 습도: 20~85% RH

■ 손질과 보관 시 주의사항

- 손질할 때는 벤진, 시너 등을 사용하지 마십시오.
- 아래 장소에는 보관하지 마십시오.
 - 직사광선이 쬐는 장소
 - 고온, 다습, 물기 근처, 먼지가 많은 장소
 - 진동이 많은 장소
 - 화학약품 보관장소나 부식성 가스가 발생하는 장소
- 유명아의 손이 닿지 않는 장소에 두십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 완전 충전 상태에서 가능한 한 상온 (10~30℃)에서 보관하십시오.
- 3개월에 한 번은 충전하십시오. 완전히 방전하면 충전하지 못하게 될 수 있습니다.



매정 점검			오랫동안 사용하시는 저주파 치료기를 점검하십시오!	
	이런 증상이 없습니까?	● 충전 중, 동작 중에 이상한 소리나 진동이 있다 ● 본체가 이상할 정도로 뜨겁다 ● 본체가 변형되어 있거나 타는 냄새가 난다	▶	사용 중지 사고 방지를 위해 제품의 전원을 끄거나 전용 USB 케이블을 뽑고 반드시 판매점에 점검을 의뢰하십시오.

폐기할 때는

■리튬이온전지 리사이클에 관한 부탁



Li-ion

본 제품은 리튬이온전지를 내장하고 있습니다. 리튬이온전지는 리사이클 할 수 있는 귀중한 자원이므로 리사이클에 협력을 부탁드립니다. 본 제품을 폐기할 때는 거주하시는 시구청촌의 지시에 따르십시오.

- 폐기할 때는 전지를 분해하지 마십시오.
- 본 제품은 일반 가정 쓰레기로 폐기하지 마십시오. 폐기된 리튬이온전지가 쓰레기 수거차 등에서 파괴되어 쇼트 현상이 일어나 발화, 발열의 원인이 됩니다.

■리튬이온전지를 꺼내는 방법

제품을 폐기할 때 이외에는 절대로 분해하지 마십시오.




경고

아래 순서는 **제품을 폐기하기 위한 것으로, 수리용이 아닙니다.**

분해한 경우에는 복원할 수 없습니다.

- 충전 잔량이 있을 때는 전지를 끝까지 다 사용하십시오
- 드라이버를 사용하여 다음 순서로 분해해 주십시오.

- ① 본체 전원 버튼 바로 아래 부근의 홈에 마이너스 드라이버를 끼워서 연다
- ② 기판을 고정하고 있는 나사를 떼어낸다
- ③ 기판 뒤에 있는 전지 코드를 니퍼로 마이너스의 검정색 코드부터 자른다
- ④ 전지를 떼어낸다

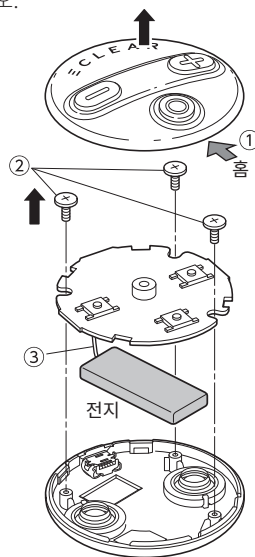

- 꺼낸 전지는 ⊕와 ⊖의 단자에서 쇼트 현상이 일어나지 않도록 주의하면서 단자부에 테이프를 붙여서 절연해 주십시오.

이런 경우는

상황	원인	대처법
전원이 안 켜질 때	- 전지 충전이 충분하지 않거나 충전이 중단되었다 - 전지 충전 중	- 전원을 끄고 충전을 하십시오. ➡P.11 - 전지 충전이 완료된 후 전용 USB 케이블을 빼고 사용하십시오. ➡P.11
전지가 금방 떨어진다 사용 중에 전원이 꺼진다	- 전지 충전이 충분하지 않거나 충전이 중단되었다 - 본체와 젤패드 접촉이 충분하지 못하다 - 젤패드가 피부에 밀착하지 않았다	- 전원을 끄고 충전하십시오. ➡P.11 - 전원을 끄고 본체와 젤패드 접촉을 다시 하십시오. ➡P.12, P.13 - 전원을 끄고 피부에 밀착시키십시오. ➡P.14
충전이 안 된다	장기간 보관하여 전지가 완전히 방전됐다	사용할 수 없습니다. 완전히 방전되지 않도록 3개월에 한 번 충전하십시오. ➡P.21, P.22
젤패드가 피부에 붙지 않는다	- 젤패드 점착 면의 투명 보호 필름을 벗기지 않았다. - 젤패드 점착 면이 더러워져 있다 - 물로 씻은 후 바로 사용하고 있다 - 젤패드 점착 면이 손상했다	- 점착 면의 투명 보호 필름을 떼십시오. ➡P.14 - 소량의 흐르는 물에 씻으면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻으십시오. ➡P.19 - 충분히 물기를 뺀 다음에 점착 면을 자연 건조시키십시오. ➡P.19 - 젤패드는 소모부품입니다. 점착 면이 손상했을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구매하십시오. ➡P.9
젤패드 점착 면이 벗겨진다,	젤패드 점착 면에 땀이나 수분이 많이 묻었다	젤패드는 소모부품입니다. 점착 면이 손상했을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구매하십시오. ➡P.9
자극을 느끼지 못한다/ 자극이 약하다	- 젤패드가 피부에 밀착하지 않았다 - 젤패드를 겹쳐서 붙였다 - 젤패드 점착 면이 더러워져 있다 - 젤패드가 바르게 접촉되지 않았다 - 세기 조절이 약해졌다 - 충전이 충분하지 않거나 전지가 소모했다 - 젤패드 점착 면이 더러워져 있다, 손상했다	- 피부에 밀착시키십시오. ➡P.14 - 겹치지 않도록 붙이십시오. ➡P.14 - 소량의 흐르는 물에 손가락 끝으로 몇 초간 씻으십시오. ➡P.19 - 찰칵하고 소리가 나도록 바르게 접촉하십시오. ➡P.12 - 세기를 조절하십시오. ➡P.17 - 충전하십시오. ➡P.11 - 젤패드는 소모부품입니다. 점착 면이 손상했을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구매하십시오. ➡P.9
피부가 빨개졌다/ 피부가 따끔거린다	- 치료 시간이 너무 길었다 - 젤패드가 피부에 밀착하지 않았다 - 젤패드 점착 면이 더러워졌거나 말라 있다 - 젤패드 점착 면이 손상했다	- 한군데 15분 이내에 사용하고 사용 후에는 젤패드를 피부에서 떼어내십시오. ➡P.18 - 피부에 밀착시키십시오. ➡P.14 - 소량의 흐르는 물에 손가락 끝으로 몇 초간 씻으십시오. ➡P.19 - 젤패드는 소모부품입니다. 점착 면이 손상했을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구매하십시오. ➡P.9

제품 사양

판매명	저주파 치료기 P01
분류	기계 기구 78 가정용 전기치료기
일반적 명칭	가정용 저주파 치료기 (코드 : 70986000)
의료기기 종류	관리의료기기
의료기기인증번호	228ADBZX00037000
전원 전압	DC 5.0V ± 5% (리튬이온전지)
내장 전지	40mAh ※ 1 ※ 2
반복 충전 횟수	약 500 회 ※ 1
충전 시간	약 3.5 시간 ※ 3
동작 시간	약 150 분 (완전 충전 시) ※ 4
최대출력전류	약 10mA 이하
정격출력전압	약 32V
기본 주파수	약 2~550 Hz
출력 펄스 폭	약 200 μs
소비전력	약 1.2W
타이머	약 15 분
본체 크기	약 ø 44 mm x D 11 mm
케이블 길이	약 200 mm
본체 질량	약 13g
사용환경 온도 · 습도	0°C ~40°C 20~85% RH
보관환경 온도 · 습도	-10°C ~60°C 20~85% RH
제조 판매처	엘레컴 헬스 케어 주식회사 오사카부 오사카시 주오구 후시미마치 4-1-1 LA 타워 8 층
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
生産国	중국

※1 JIS C 8711에 의거한다

※2 과충전, 과방전, 과전압 보호기능 탑재

※3 다 사용한 전지를 완전히 충전할 때 기준

※4 동작 내용, 사용 환경에 따라 변화합니다.

책임의 제한

- 엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.
- 엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

본 제품은 일본 국내 사양입니다. 국외에서의 사용에 관해서는 폐사에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 문의사항에 대해서는 일본어로만 지원합니다. 보수용 부품은 제조 중지 후 최소 5년간 보유합니다.

에클리어 리프리 HCM-P01 시리즈
사용설명서

2016년 8월 제2판
엘레컴 주식회사

- 본 설명서의 저작권은 엘레컴 주식회사가 보유하고 있습니다.
- 본 설명서의 내용 중 일부 또는 전부를 무단으로 복사/전재하는 것을 금지하고 있습니다.
- 본 제품의 사양 및 외관은 제품 개량으로 예고 없이 변경할 수가 있습니다.
- 본 제품을 사용하여 발생한 다른 기기의 고장이나 오작동 등에 대해서는 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- 본 제품 가운데 전락물자 또는 역무에 해당하는 물건을 수출할 때는 외국인 및 외국무역법에 준거하는 수출 또는 역무 거래 허가가 필요합니다.
- 기타 본서에 기재되어 있는 회사명, 제품명 등은 일반적으로 각사의 상표 또는 등록상표입니다.