

ゲルパッド P01 は、低周波治療器 P01 HCM-P01 シリーズ用パッドです。
この商品は低周波電流を身体に伝えるために装着するものです。
治療を行う前に必ず低周波治療器 P01 の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

 警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意 「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
 してはいけない「禁止」の内容です。	 必ず実行していただく「強制」の内容です。


 警告	
	治療以外の目的で使用しないでください。事故やトラブル、故障の原因となります。
	ゲルパッドに時計やネックレスなどの金属が触れた状態で使用しないでください。事故やケガの原因となります。
	ゲルパッドの表面が欠けていたり、崩れていたりする状態で使用しないでください。事故やトラブル、故障の原因となります。
	本体とゲルパッドを接続・取り外すとき、ゲルパッドを貼る・貼りかえる・はがすときは必ず電源を切ってから行ってください。感電・故障の原因となります。
 分解禁止	分解や修理、改造をしないでください。火災や感電の原因となります。
	本製品は一人用です。複数の人で同時に使用しないでください。事故・故障の原因となります。

ゲルパッドの交換方法 [2 Point Pad の場合]


- ① 本体の電源が切れている (LED ランプが消えている) ことを確認します。
- ② 本体をゲルパッドから取り外します。

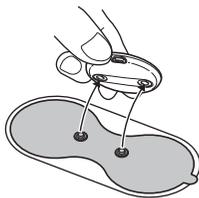

- ③ ゲルパッドを袋から取り出します。
(ゲルパッドについている保護フィルムは、まだはがさないでください。)

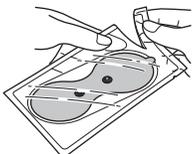

- ④ 本体とゲルパッドの接続端子を「カチッ」と音がするまで接続します。

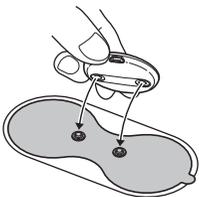

※1 1 Point Pad および Wide Pad も同様の方法で交換を行ってください。
※2 Wide Pad を使用する場合は、片側のつまみを 2 ついっしょに持ってはがしてください。

注意

-  下記の場所では、使用したり保管したりしないでください。
・直射日光のあたる場所・暖房器具の近くなど、温度の高い場所
・浴室など湿気の多い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所
火災、感電、故障の原因となります。
-  長時間ゲルパッドを肌に貼り付けたままにしないでください。
皮膚の炎症などの原因となります。
-  ゲルパッドが水に濡れた状態で使用しないでください。
感電の原因となります。
-  ゲルパッドを 2 枚重ねた状態で使用しないでください。
感電・事故の原因となります。
-  機器に荷重がかかる体勢および無理な体勢でお使いにならないでください。
故障の原因となります。
-  本体とゲルパッドは、正しく確実に接続されていることを確認してからご使用ください。
-  本製品の使用によって、強い刺激や、肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良の原因となります。
-  濡れた手でゲルパッドを触らないでください。
感電や故障・事故の原因となります
-  幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。
万一、本体を幼児が飲み込んだときは直ちに医師に相談してください。
事故の原因となります。
-  本製品を廃棄するときは、お住いの市区町村の指導に従ってください。廃棄するときは分解しないでください。

パッケージ内容の確認

<p>HCM-P01G1BU HCM-P01G1PN 1 Point Pad ゲルパッド</p>  <p>保管用シート</p> <p>添付文書・取扱説明書 (本書)</p>	<p>HCM-P01G2BU HCM-P01G2PN 2 Point Pad ゲルパッド</p>  <p>保管用シート</p> <p>添付文書・取扱説明書 (本書)</p>	<p>HCM-P01G3BU HCM-P01G3PN Wide Pad ゲルパッド</p>  <p>保管用シート (Wide Pad 専用)</p> <p>添付文書・取扱説明書 (本書)</p>
---	---	--

取り扱い・お手入れについて [2 Point Pad の場合]

■ゲルパッドの取り扱いについて

- ・ゲルパッドの貼り付け面に触らないでください。
- ・ゲルパッドは折り曲げないでください。
- ・使用しないときは保管用シートの両面に貼り付けて保管してください
- ・ゲルパッドが濡れた状態で、使用しないでください。
十分に水分を切って、貼り付け面を自然乾燥させてからご使用ください。
- ・直射日光の当たらないところ、湿気の少ないところに保管してください。

■ゲルパッドのお手入れ


本体からゲルパッドを外した状態で、お手入れしてください。

以下の場合に、ゲルパッドのお手入れをしてください。

- ・ゲルパッドが貼り付きにくくなったとき
- ・治療時の刺激が弱くなったとき
- ・治療時にピリピリした刺激を感じるとき
- ・ゲルパッドが汚れたとき
- ・ゲルパッドが保管用シートに貼り付かないとき

お手入れしても刺激が弱くなってきたり、ピリピリ感を感じたりする場合は、ゲルパッドを交換してください。

- ① 少量の水をかけながら、指先で軽く数秒洗います。
※水をかけすぎないでください。粘着力の低下や、粘着面が傷む原因になります。

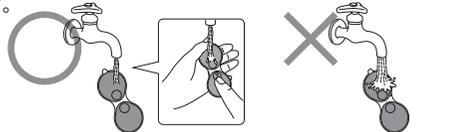


- ② つまみを持って十分に水を切り、自然乾燥させます。
※乾燥が不十分な場合、粘着力が弱くなります。
※ティッシュや布などで粘着面を拭かないでください。
※直射日光は避けてください。




ゲルパッドの貼り付け例

【痛みやコリを感じる部位に貼りつけてください。】

■1 Point Pad の場合

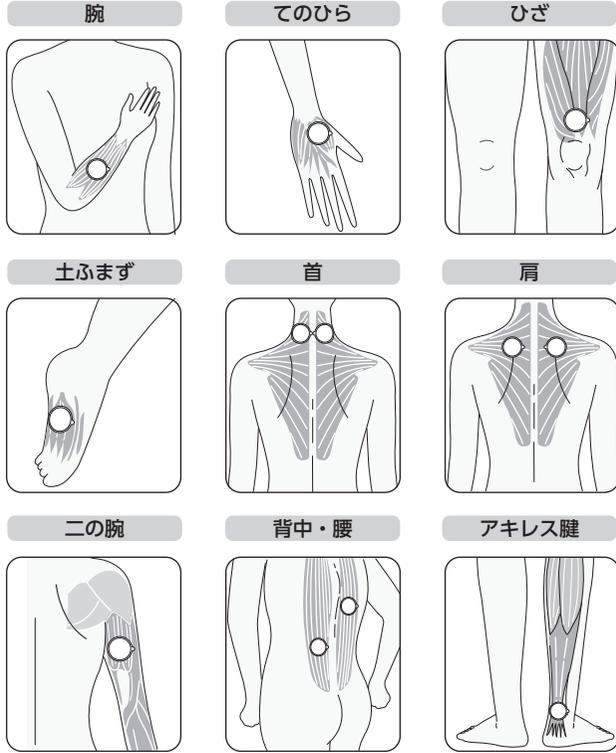


■2 Point Pad の場合

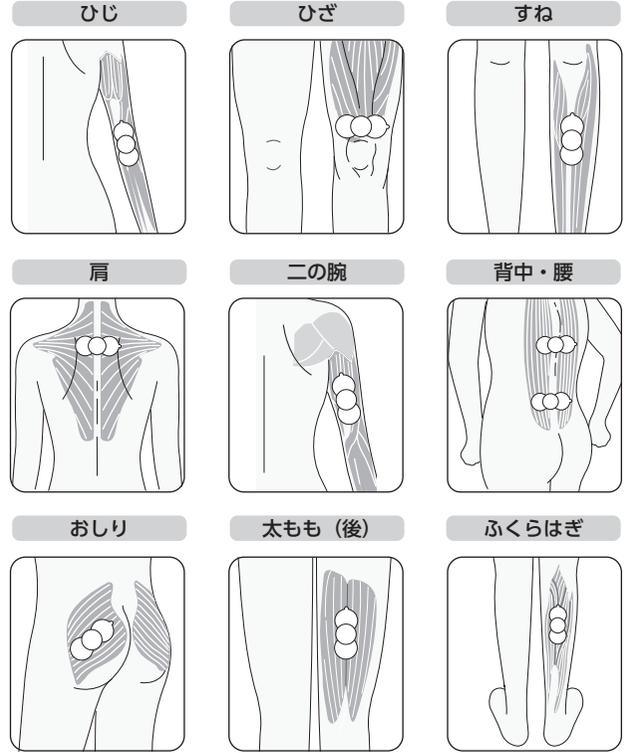

ゲルパッドの貼り付け例

■Wide Pad の場合

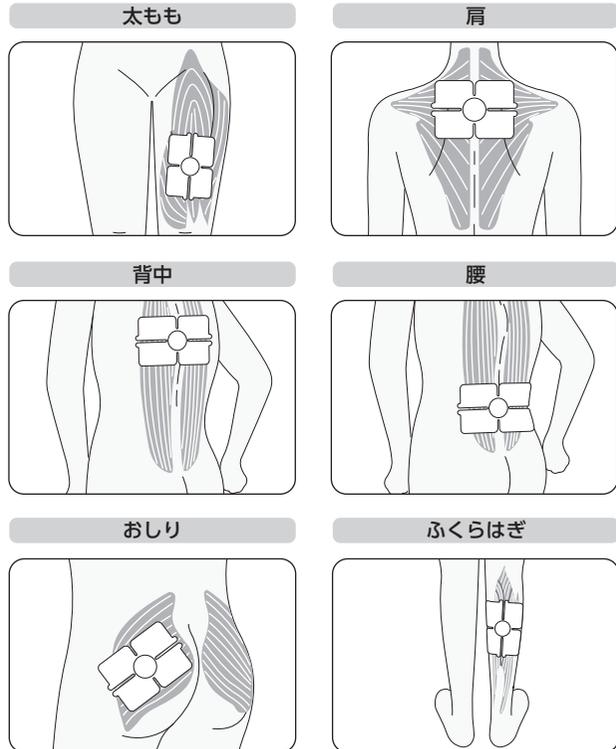

定 格 ・ 仕 様

販売名	ゲルパッド P01
類別	機械器具 78 家庭用電気治療器
一般的名称	家庭用低周波治療器向け導子 (JMDN コード 71008000)
医療機器の種類	一般医療機器
医療機器届出番号	27B2X00293000001
寸法	1 Point Pad φ50 × D 4.65 mm 2 Point Pad W110 × H50 × D4.65 mm Wide Pad W160 × H105 × D4.65 mm
質量	1 Point Pad 約 2.9 g (2 枚入) 2 Point Pad 約 5.2 g (1 枚入) Wide Pad 約 17.7 g (1 枚入) ※ 1 枚当たりの質量
製造販売元	エレコムヘルスケア株式会社 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LA タワー 8F
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
生産国	中国

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター 受付時間 / 10:00 ~ 19:00
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問合せには日本語によるサポートに限定させていただきます。

補修用部品は製造打ち切り後、最低 5 年間保有しています。

Phone support is available only in Japanese.

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！



Q えれさぽ 検索