

겔패드 PH01은 온열 저주파 치료기 PH01 HCM-PH01 시리즈용 겔패드입니다.
이 상품은 저주파 전류 및 온열을 신체에 전달하기 위해 장착하는 것입니다.
치료를 실시하기 전에 반드시 온열 저주파 치료기 PH01의 취급설명서를 잘 읽고
올바르게 사용하십시오.

안전상의 주의(반드시 준수하십시오.)

사용하는 사람이나 타인에 대한 위해, 재산에 대한 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시
지켜야 하는 점을 다음과 같이 설명합니다.


■ 표시 내용을 무시하고 잘못된 방법으로 사용했을 때 발생하는 손해의 정도를 다음
표시로 구분하여 설명합니다.

경고 '사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 있는' 내용입니다.	주의 '상해를 입을 가능성 또는 물적 손상만 발생할 가능성이 있는' 내용입니다.
해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.	반드시 실행해야 하는 '강제' 내용 입니다.

경고	
⊘	치료 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 사고나 트러블, 고장의 원인이 됩니다.
⊘	겔패드에 시계나 목걸이 등 금속이 닿은 상태로 사용하지 마십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
⊘	겔패드 표면에 흙이 있거나 망가진 상태로 사용하지 마십시오. 사고나 트러블, 고장의 원인이 됩니다.
!	본체와 겔패드를 연결·분리할 때, 겔패드를 붙이거나 위치를 바꿔 붙이거나 떨 때는 반드시 전원을 끄고 실시하십시오. 감전·고장의 원인이 됩니다.
⊘ 본체 금지	본체나 수리, 개조하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
⊘	본 제품은 1인용입니다. 여러 사람에게 동시에 사용하지 마십시오. 사고·고장의 원인이 됩니다.


겔패드의 교환 방법

- ① 본체의 LED 램프가 모두 꺼지고 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- ② 겔패드의 플러그를 본체에서 분리합니다.

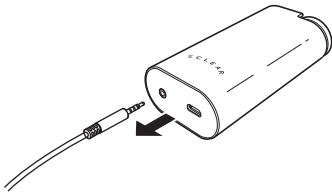

- ③ 겔패드를 봉투에서 꺼냅니다.
(겔패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 마십시오.)

- ④ 겔패드의 플러그를 본체의 연결 단자에 단단히 연결합니다.

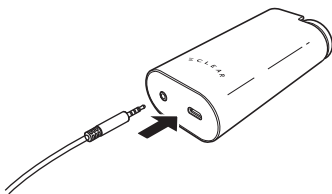


플러그를 잡고 끝까지 단단히 꽂으십시오.

주의

⊘	아래와 같은 곳에서는 사용하거나 보관하지 마십시오. ·직사광선에 노출된 곳, 난방 기구 옆 등 온도가 높은 곳 ·욕실 등 습기가 많은 장소·물가·먼지가 많은 곳·진동이 많은 곳 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
⊘	겔패드를 장시간 피부에 붙인 채로 있지 마십시오. 피부 염증 등의 원인이 됩니다.
⊘	겔패드가 물에 젖은 상태로 사용하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
⊘	겔패드를 2장 겹친 상태로 사용하지 마십시오. 감전·사고의 원인이 됩니다.
⊘	기기에 하중이 가해지는 자세 및 무리한 자세로 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
!	본체와 겔패드는 올바르게 확실하게 연결되어 있는지 확인한 후 사용하십시오.
!	본 제품의 사용에 의해 강한 자극이나 피부에 습진, 발적, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 의사에게 상담하십시오. 사고나 컨디션 불량 등의 원인이 됩니다.
⊘ 젖은 손 금지	젖은 손으로 겔패드를 만지지 마십시오. 감전이나 고장·사고의 원인이 됩니다.
⊘	유아의 손이 닿는 곳에 두거나 보관하지 마십시오. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사에게 상담하십시오. 사고의 원인이 됩니다.
⊘	본 제품을 폐기할 때는 거주하는 지역의 지도에 따르십시오. 폐기할 때는 분해하지 마십시오.

패키지 내용 확인

제품 안내는 판매점으로 문의하십시오.

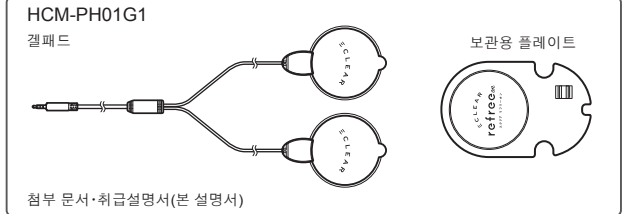

취급·손질에 대해서

■ 겔패드 취급에 대해서

- 겔패드의 점착면을 만지지 마십시오.
- 겔패드는 구부리지 마십시오.

■ 겔패드 손질하기

본체에서 겔패드를 분리한 상태로 손질하십시오.

아래 경우에 겔패드를 손질하십시오.

- 겔패드가 잘 안 붙게 된 경우
- 사용 시의 자극이 약해진 경우
- 사용 시에 찢릿찌릿한 자극이 느껴지는 경우
- 겔패드가 오염된 경우
- 겔패드가 보관용 플레이트에 붙지 않는 경우

손질해도 자극이 점점 약해지거나 찢릿찌릿한 느낌이 오는 경우는 겔패드를
교환하십시오.

- ① 물을 몇 방울 떨어뜨리고 손가락 지문 부위로 문질러서 들뜬 오염을 닦기

- ※ 물을 너무 많이 묻히지 마십시오. 점착력 저하나 점착면 손상의
원인이 됩니다.
- ※ 손톱이나 브러시로 세게 문지르지 마십시오.
- ※ 세제 등은 사용하지 마십시오.
- ※ 플러그, 전극 코드나 손잡이 부분에 물이 묻지 않게 하십시오.



- ② 손잡이 부분을 잡고 충분히 물을 던 후 손잡이 부분에 물이 닿지
않도록 패드를 아래쪽으로 하여 자연 건조시킵니다.


- ※ 충분히 건조되지 않으면 점착력이 약해집니다.
- ※ 휴지나 천 등으로 점착면을 닦지 마십시오.
- ※ 직사광선을 피하십시오.

겔패드 부착 예


■ 저주파, 온열 또는 온열 저주파 코스 시

통증이나 뭉침이 느껴지는 부위에 붙이십시오.


어깨-승모근-

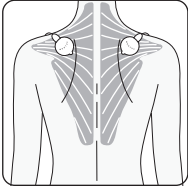


상박-상완근 그룹-

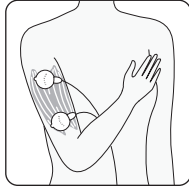


팔-전완굴근 그룹-

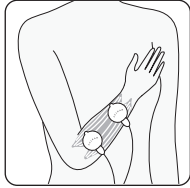


등·허리-척추기립근-

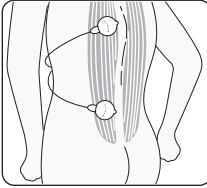


엉덩이-대둔근-

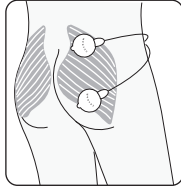

대퇴부-햄스트링근-

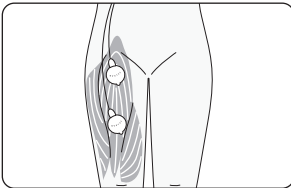




장딴지-하퇴삼두근-

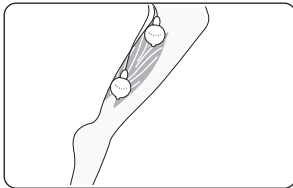

⚠ 주의:

- 저주파 코스 및 온열 저주파 코스의 경우에는 좌우 발바닥에 동시에 사용하거나 내장이 사이에 위치하도록 사용하지 마십시오.
- 겔패드를 2장 겹친 상태로 사용하지 마십시오.

통증이 있는 관절이 사이에 위치하게 하여 붙이십시오.

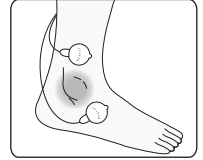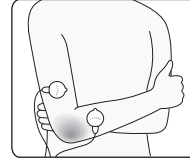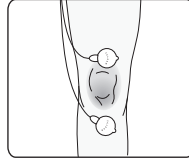


한쪽은 발바닥에 붙이고, 다른 한쪽은 장딴지 또는 발목에 붙이십시오.
※ 양발을 동시에 치료하지는 마십시오.


■ 온열 코스 시

온열 코스 시에는 저주파 또는 온열 저주파 코스 시의 부착 예 외에도 다음 부착 예를 참고하여 겔패드를 붙이십시오.


좌우 복부에 붙이기

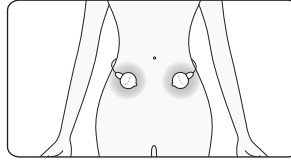


좌우 허리에 붙이기

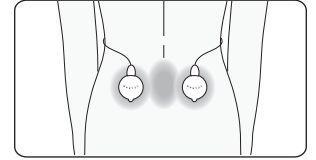

양쪽 발바닥에 붙이기

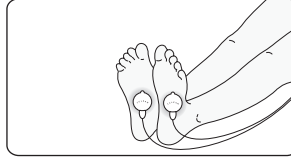

목덜미에 붙이기

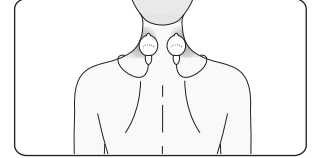

보관 방법

본 제품은 다음 조건을 충족하는 환경에서 보관하십시오.

보관 온도: -10℃~60℃

보관 습도: 20~85%RH

■ 손질 및 보관 시 주의사항

- 손질 시에는 벤젠이나 시너 등을 사용하지 마십시오.
- 아래와 같은 곳에는 보관하지 마십시오.
 - 직사광선에 노출된 곳
 - 고온, 다습, 물가, 먼지가 많은 곳
 - 진동이 많은 곳
 - 화학약품의 보관 장소나 부식성 가스가 발생하는 곳
- 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.



정격·사양

판매명	겔패드 PH01
분류	기계기구 78, 가정용 전기 치료기
일반 명칭	가정용 저주파 치료기용 전극(JMDN 코드 71008000)
의료기기의 종류	일반의료기기
의료기기 신고번호	27B2X00293000002
치수	패드부 치수: 약 Ø 60mm 케이블 길이: 약 1100mm
무게	약 33g
제조판매원	엘레컴 헬스케어 주식회사 오사카부 오사카시 주오구 후시미마치 4-1-1 LA 타워 8층
제조사	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
생산국	중국

이 사용자 설명서는 일본 제약 및 의료 기기법을 기반으로 하고 있습니다. 일본 외 국가에서 구매하신 고객은 반드시 구매 국가의 실정이 반영된 설명서를 참조하십시오.

www.elecom.co.jp/global/download-list/

일본 외 구매 고객들은 문의 사항이 있을 경우 구매 국가의 대리점에 연락하십시오. "ELECOM CO., LTD. (Japan)"은 일본 외 다른 국가에서의 구매 또는 사용에 대한 문의사항을 응대할 수 없습니다. 또한 일본어 외의 외국어 지원 서비스를 사용할 수 없습니다. 교환은 엘레컴 보증서의 명시에 따라 이루어지며, 일본 외 지역에 해당되지 않습니다.