

ゲルパッド PH01 は、温熱低周波治療器 PH01 HCM-PH01 シリーズ用ゲルパッドです。
この商品は低周波電流及び温熱を身体に伝えるために装着するものです。
治療を行う前に必ず温熱低周波治療器 PH01 の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	注意 「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
⊘ してはいけない「禁止」の内容です。	❗ 必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告	
⊘	治療以外の目的で使用しないでください。 事故やトラブル、故障の原因となります。
⊘	ゲルパッドに時計やネックレスなどの金属が触れた状態で使用しないでください。 事故やケガの原因となります。
⊘	ゲルパッドの表面が欠けていたり、崩れていたりする状態で使用しないでください。 事故やトラブル、故障の原因となります。
❗	本体とゲルパッドを接続・取り外すとき、ゲルパッドを貼る・貼りかえる・はがすときは必ず電源を切ってから行ってください。 感電・故障の原因となります。
⊘ 分解禁止	分解や修理、改造をしないでください。 火災や感電の原因となります。
⊘	本製品は一人用です。複数の人で同時に使用しないでください。 事故・故障の原因となります。


ゲルパッドの交換方法

- ① 本体の LED ランプがすべて消えて、電源が切れていることを確認します。
- ② ゲルパッドのプラグを本体から取り外します。

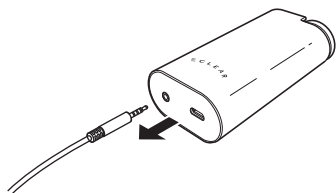

- ③ ゲルパッドを袋から取り出します。
(ゲルパッドについている保護フィルムは、まだはがさないでください。)

- ④ ゲルパッドのプラグを本体の接続端子にしっかりと接続します。

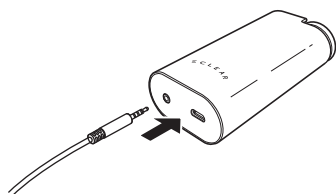

プラグを持って、奥までしっかり差し込んでください。

注意

- ⊘ 下記の場所では、使用したり保管したりしないでください。
・直射日光のあたる場所・暖房器具の近くなど、温度の高い場所
・浴室など湿気の多い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所
火災、感電、故障の原因となります。
- ⊘ 長時間ゲルパッドを肌に貼り付けたままにしないでください。
皮膚の炎症などの原因となります。
- ⊘ ゲルパッドが水に濡れた状態で使用しないでください。
感電の原因となります。
- ⊘ ゲルパッドを 2 枚重ねた状態で使用しないでください。
感電・事故の原因となります。
- ⊘ 機器に荷重がかかる体勢および無理な体勢でお使いにならないでください。
故障の原因となります。
- ❗ 本体とゲルパッドは、正しく確実に接続されていることを確認してからご使用ください。
- ❗ 本製品の使用によって、強い刺激や、肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良の原因となります。
- ⊘ 濡れた手でゲルパッドを触らないでください。
感電や故障・事故の原因となります
- ⊘ 幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。
万一、本体を幼児が飲み込んだときは直ちに医師に相談してください。
事故の原因となります。
- ⊘ 本製品を廃棄するときは、お住いの市区町村の指導に従ってください。廃棄するときは分解しないでください。

パッケージ内容の確認

製品のご案内は、エレコム総合インフォメーションセンター(裏面記載)までお問い合わせください。

HCM-PH01G1

ゲルパッドの貼り付け例




■低周波、温熱または温熱低周波コース時

痛みやコリを感じる部位に貼り付けてください。

肩 - 僧帽筋 -



二の腕 - 上腕筋群 -

腕 - 前腕屈筋群 -

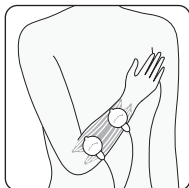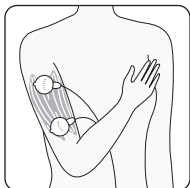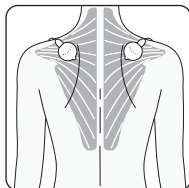



背中・腰 - 脊柱起立筋 -

おしり - 大臀筋 -

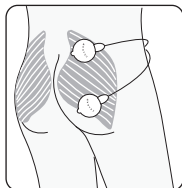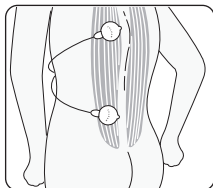

ふともも - ハムストリング筋 -





ふくらはぎ - 下腿三頭筋 -

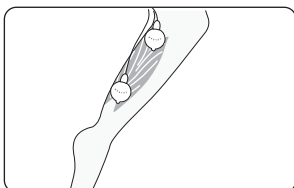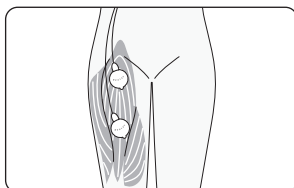

△ 注意：

- ・低周波コース及び温熱低周波コースの場合は、左右の足裏の同時使用や、内臓を挟むようにしての使用はしないでください。
- ・ゲルパッドを2枚重ねた状態で使用しないでください。

痛みのある関節を挟むようにして貼り付けてください。

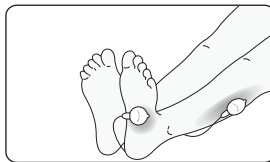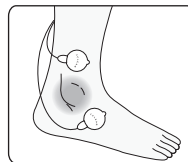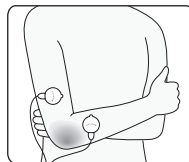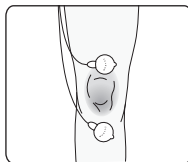


一方は、足裏に貼り付け、もう一方はふくらはぎまたは足首に貼り付けてください。
※両足の同時治療は行わないでください。


■温熱コース時

温熱コース時は、低周波または温熱低周波コース時の貼り付け例のほか、下記の貼り付け例をご参考にしてゲルパッドを貼り付けてください。


左右のお腹に貼り付ける

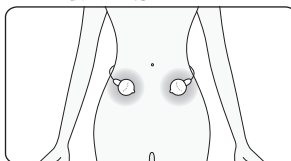


左右の背中に貼り付ける

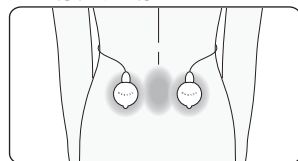

両方の足裏に貼り付ける

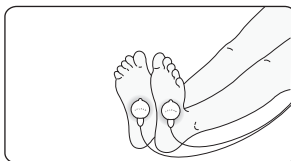

首筋に貼り付ける

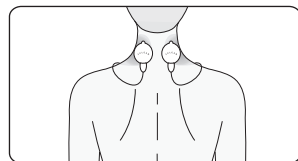

保管のしかた

本製品は、次の条件を満たしている環境で保管してください。

保管温度：-10℃～60℃

保管湿度：20～85%RH

■お手入れと保管時のご注意

- ・お手入れをする時、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- ・下記の場所には保管しないでください。
 - －直射日光の当たる場所
 - －高温、多湿、水気の近く、ホコリが多い場所
 - －振動が多い場所
 - －化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- ・乳幼児の手がとどかない場所に置いてください。

