

本製品は、エクリア リーン HCT-P01シリーズおよびエクリア リーンアップ HCT-BTP01 シリーズ専用ジェルパッドです。

この商品は電気刺激を身体に伝えるために装着するものです。  
使用する前に必ずエクリア リーン HCT-P01 シリーズまたはエクリア リーンアップ HCT-BTP01 シリーズの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。


<b>警告</b> [死亡または重傷などを負う可能性が想定される]内容です。	<b>注意</b> [傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される]内容です。
⊘ してはいけない「禁止」の内容です。	⚠ 必ず実行していただく「強制」の内容です。

<b>警告</b>	
⊘ トレーニング以外の目的で使用しないでください。 事故やトラブル、故障の原因となります。	
⊘ 下記の部位には使用しないでください。 ・胸部などの心臓の付近や頭や顔などの首から上の部位 ・傷口、目、口、陰部などの粘膜部位 ・整形手術した部位 ・金属、プラスチック、シリコンなど埋め込んである部位 ・背骨、脊椎 ・刺青(タトゥー)を入れている部位 ・生理中の腹部 ・ネックレスや時計、ボディピアスをしている部位	
⊘ ジェルパッドの表面が欠けていたり、崩れていたりする状態で使用しないでください。 事故やトラブル、故障の原因となります。	
⚠ 本体とジェルパッドを接続・取りはずすとき、ジェルパッドを貼る・貼りかえる・はがすときは必ず電源を切ってから行ってください。 感電や故障の原因となります。	
⊘ 分解や修理、改造したりしないでください。 火災や感電の原因となります。	
⊘ 本製品は一人用です。 複数の人で使用しないでください。 感電・事故の原因となります。	

## ジェルパッドの交換方法


① 本体の電源が切れている(LEDランプが消えている)ことを確認します。

② 本体をジェルパッドから取り外します。 [コアパッドの場合]

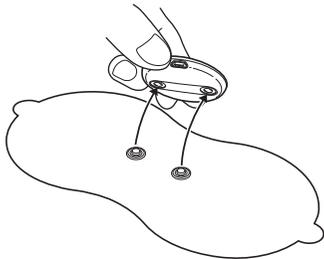

③ ジェルパッドを袋から取り出します。  
(ジェルパッドについている保護フィルムは、まだはがさないでください。)

④ 本体とジェルパッドの接続端子を"カチッ"と音がするまで接続します。

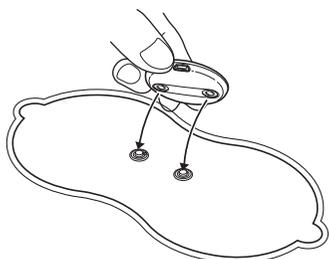

※ツインパッドも同様の方法で交換を行ってください。

## 注意

⊘	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 ・直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近くなど、湿度の高い場所 ・水気の近く ・ホコリが多い場所 ・振動の多い場所 火災、感電、故障の原因となります。
⊘	長時間ジェルパッドを肌に貼り付けたままにしないでください。 皮膚の炎症などの原因となります。
⊘	ジェルパッドが水に濡れた状態で使用しないでください。 感電・事故の原因となります。
⊘	ジェルパッドを2枚重ねた状態で使用しないでください。 感電・事故の原因となります。
⊘	機器に荷重がかかる体勢および無理な体勢でお使いにならないでください。 故障の原因となります。
⊘	1日1か所につき、30分以上使用しないでください。 事故や体調不良の原因となります。
⚠	同時に使用する場合は2か所までにしてください。 事故や体調不良の原因となります。
⚠	本体とジェルパッドは、正しく確実に接続されていることを確認してからご使用ください。
⚠	本製品の使用によって、強い刺激や、肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。 事故や体調不良の原因となります。
⊘	濡れた手で専用USBケーブルやジェルパッドを触らないでください。 感電や故障、事故の原因となります。
⊘	幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。 事故の原因となります。万一、本体を幼児が飲み込んだときは、直ちに医師に相談してください。
⊘	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

## パッケージ内容の確認

製品のご案内は、エレコム総合インフォメーションセンター(裏面記載)までお問い合わせください。

ツインパッド (2枚入り)		コアパッド (1枚入り)	
型番：HCT-BTP01G1		型番：HCT-BTP01G2	
ツインパッド (消耗品)	保管用シート	コアパッド (消耗品)	保管用シート
取扱説明書(本書)		取扱説明書(本書)	

## 取り扱い・お手入れについて

### ■ジェルパッドの取り扱いについて

- ・ジェルパッドの貼り付け面に触らないでください。
- ・ジェルパッドは折り曲げないでください。
- ・使用しないときは保管用シートの両面に貼り付けて保管してください
- ・ジェルパッドが濡れた状態で、使用しないでください。  
十分に水分を切って、貼り付け面を自然乾燥させてからご使用ください。
- ・直射日光の当たらないところ、湿気の少ないところに保管してください。

### ■ジェルパッドのお手入れ(お手入れ目安:30回程度ご使用毎に1回)

本体からジェルパッドを外した状態で、お手入れしてください。


以下の場合に、ジェルパッドのお手入れをしてください。

- ・ジェルパッドが貼り付きにくくなったとき
- ・使用時の刺激が弱くなったとき
- ・使用時にピリピリした刺激を感じるとき
- ・ジェルパッドが汚れたとき
- ・ジェルパッドが保管用シートに貼り付かないとき

お手入れしても刺激が弱くなってきたり、ピリピリ感を感じたりする場合は、ジェルパッドを交換してください。

① 少量の水をかけながら指先で軽く数秒洗います。

※水をかけすぎないでください。粘着力の低下や、粘着面が傷む原因になります。


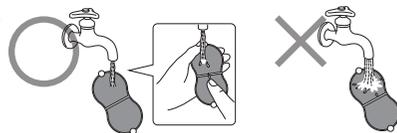


② つまみを持って十分に水を切り、自然乾燥させます。

- ※乾燥が不十分な場合、粘着力が弱くなります。
- ※ティッシュや布などで粘着面を拭かないでください。
- ※直射日光は避けてください。



# ゲルパッドの貼り付け例

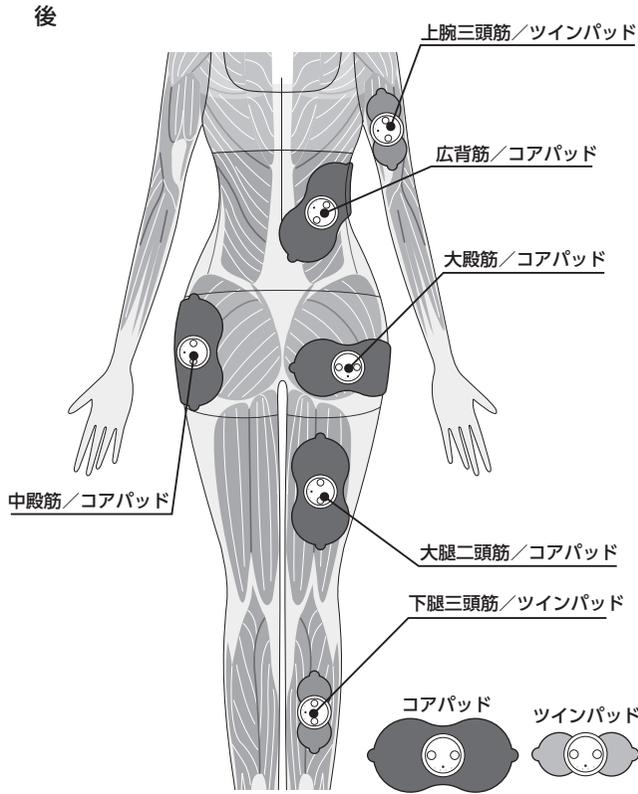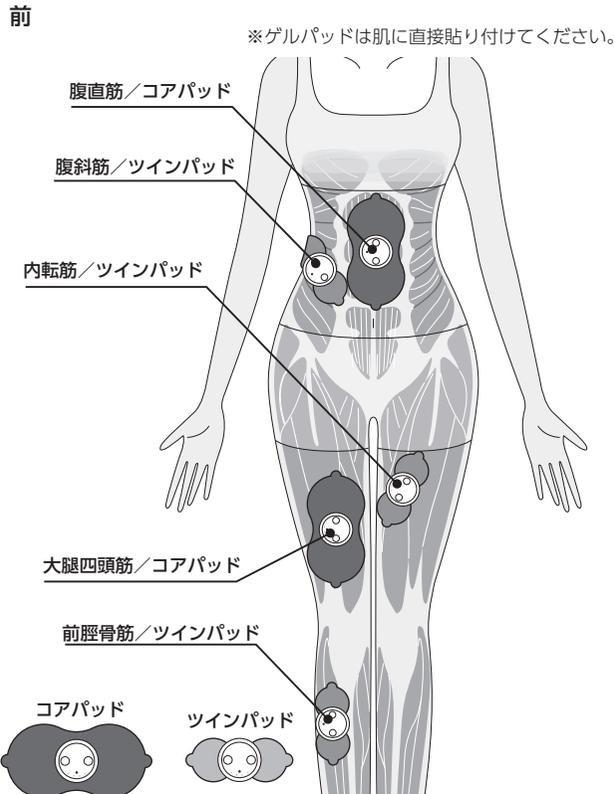

## 保管のしかた

本製品は、次の条件を満たしている環境で保管してください。

保管温度：-10℃～60℃

保管湿度：20～85%RH

### ■お手入れと保管時のご注意

- お手入れをする時、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 下記の場所には保管しないでください。
  - 直射日光の当たる場所
  - 高温、多湿、水気の近く、ホコリが多い場所
  - 振動が多い場所
  - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- 乳幼児の手がとどかない場所に置いてください。



## 定格・仕様

品名	エクリア リーンアップ/エクリア リーン専用ゲルパッド
対応本体型番	HCT-P01BU1、HCT-P01BU2、 HCT-P01PN1、HCT-P01PN2、HCT-BTP01
寸法	ツインパッド W125 × H50 mm × D4.65mm コアパッド W175 × H85 mm × D4.65mm
重量	ツインパッド 約 4.5g (2枚入) コアパッド 約 12.0g (1枚入) ※ 1枚当たりの質量
使用環境温湿度	0℃～40℃ 20～85%RH
保管環境温湿度	-10℃～60℃ 20～85%RH
生産国	中国

## ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター 受付時間 / 10:00～19:00  
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 (年中無休)

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。  
A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

For use in Japan only. If you made your purchase in another country, please refer to manual from the relevant country.  
日本国内専用です。日本以外でご購入いただいたお客様はご購入国のマニュアルを参照してください。

You can download the English version of the Manual from the Elecom website.

영재원 웹사이트에서 한국어 버전 취급설명서를 다운로드 할 수 있습니다. / 您可从 Elecom 网站下载本手册的简体中文版。/ 您可从 Elecom 网站下载英文版的手册。

[www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/](http://www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/)

Compliance status

규정 준수 상태 / 合規状態 / Status kepatuhan

[www.elecom.co.jp/global/certification/](http://www.elecom.co.jp/global/certification/)

各種機器との設定方法は  
えれさばで検索!

えれさば  
ELECOM SUPPORT CENTER

検索

検索