


会話のための集音器 耳かけ型集音器 ESC-RIC01

簡単マニュアル

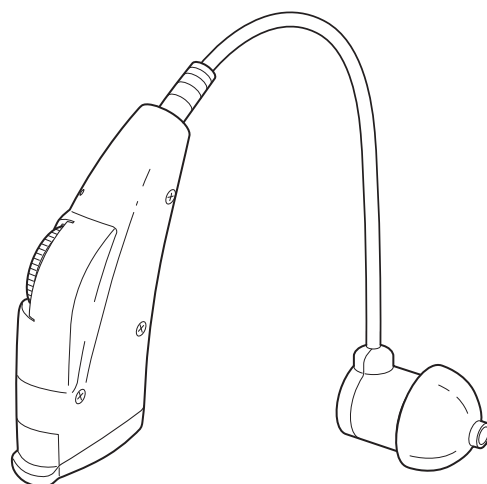


本書はご使用までの流れを簡単に説明した内容です。
詳しい内容は「取扱説明書」をご参照ください。

1 ご使用前の準備


・電池を入れる

1 音量調整器を上にして、電池ホルダーを開けます。

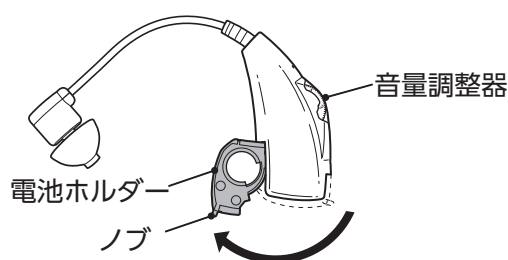

2 空気電池を入れます。


⊕面 (平らな面) を上にして、空気電池 (PR48) を電池ホルダーに入れます。
電池ホルダーから空気電池が 1/5 ほど見え、軽く引っ掛かる位置まで閉じます。

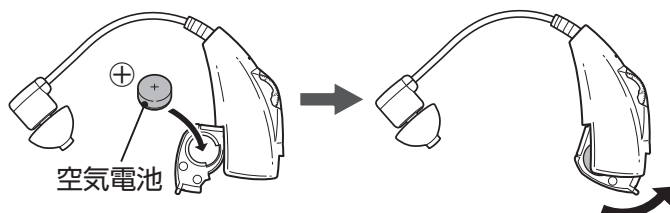


2 ご使用方法

・耳に装着する
・電源を入れる

1 電源を切って、集音器を持ちます。

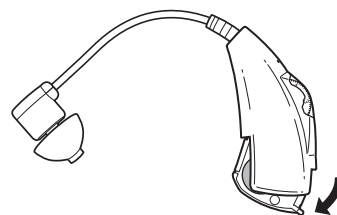

2 集音器を耳に掛けます。イヤーチップを耳にしっかり入れ、電池ホルダーを閉じます。

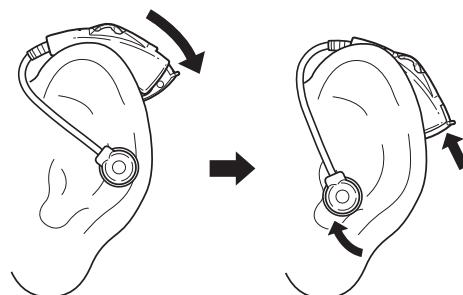


 装着前に、設定音量にご注意ください。

2 ご使用方法 (つづき)

イヤーチップの交換のしかた

✎ かならず ESC-RIC01 用のイヤーチップと交換してください。

- ① イヤーチップを図のように広げ、そのまま引っ張って取り外します。
イヤーチップホルダーを持ち、取り外してください。
- ② 新しいイヤーチップの広がっている部分を反対側にひっくり返します。
- ③ イヤーチップの穴に本体の先端をしっかりとめ込みます。
- ④ イヤーチップの広がっている部分を本体にかぶせるようにします。
- ⑤ イヤーチップを数回まわし、外れないことを確認します。

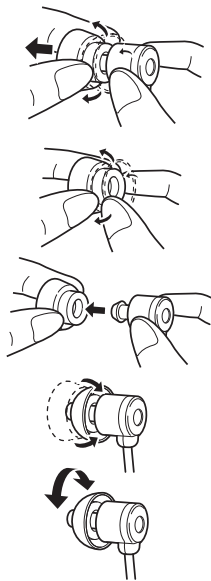


<付属のイヤーチップ>



音量の調整のしかた

音量調整器をゆっくりとまわして調整してください。

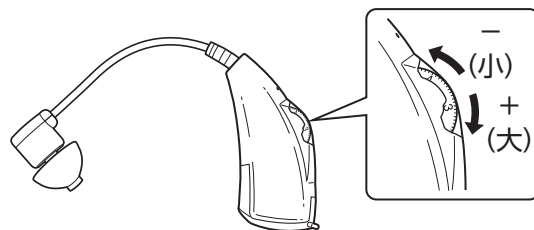


- ・音量調整器を上側にまわすと音量が小さくなります。
- ・音量調整器を下側にまわすと音量が大きくなります。

3 使い終えたら

1 電源を切り、耳から外します。

電池ホルダーを開けて電源を切り、そのままイヤーチップを軽く引き出し、集音器を耳から外します。

2 集音器から空気電池を取り出し、携帯ケースに入れて保管します。

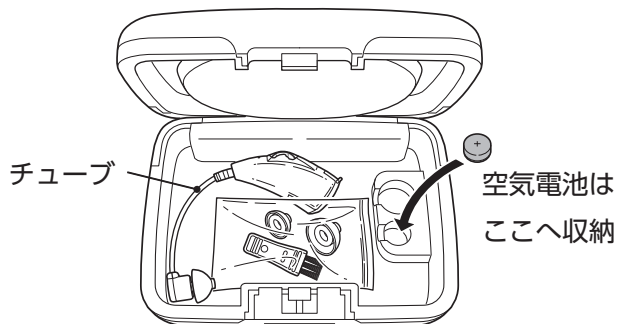

携帯ケースに入れる際、チューブが折れ曲がらないように注意してください。

4 こんなときは

■ 音が聴こえない

- ・電池ホルダーを最後まで閉めてください。
→「2 ご使用方法」の **2**
- ・空気電池の入れ方を確認し、正しく入れてください。
- ・新しい空気電池に交換してください。
→「1 ご使用前の準備」の **2**

■ “ピーピー”という音(ハウリング)がする

- ・正しく耳に装着してください。
→「2 ご使用方法」の **2**
- ・イヤーチップのサイズを交換してください。
→「2 ご使用方法」のイヤーチップの交換のしかた

5 ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 / 10:00 ~ 19:00
年中無休